

機械器具 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000 **タイヨーエネマシリンジNEO**

【禁忌・禁止】

- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある人への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ゴムを押圧することにより弁が動作し、洗浄液を吸入し、排出する。



【使用目的、効能又は効果】

- 体の一部に適用する液体を噴出し、衛生状態を維持又は治療の一環として用いる。

【品目仕様等】

- 外観ゴム部分、樹脂部分を点検し、表面は滑らかで汚れや、シミ、キズ、凸凹があつてはならない。全品目視にて行う。

寸法ゴム部分、樹脂部分の誤差は規格寸法の許容範囲内であること。通常目視で行い、必要があればノギスにて測定する。

【操作方法又は使用方法等】

- 短い方のゴム管を洗浄容器の中に入れゴム球を押圧し、ゆるめると液が吸い込まれ再度の押圧により嘴管先より噴水する。これを繰り返すことによって連続的に噴水し洗浄を行う。【使用上の注意】

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。

- ・医師の治療を受けている人
 - ・症状により薬液を使用して洗浄する人
 - ・鼻腔内に障害のある人、また炎症のひどい人
- 洗浄水の温度には十分注意し、特にお子様、高齢者、身体のご不自由な方のご使用にはやけど等に気をつけること。

使用後は水道水で洗浄し、よく水を切り陰干しすること。特に薬液等の使用後はよく洗い流すこと。また、コネクター部分を強く引張ったり、曲げたりしないこと。弁等の故障の原因になる。

高温、直射日光等を避ること。

温度、湿度等、環境によって保管中にも劣化する場合がある。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 直射日光、高温、多湿を避け冷暗所で保管すること。

【包装】

- 1ヶ入り

【添付文書及び文献請求先】

株式会社太陽医療品製作所

TEL. 03-6383-5701 FAX. 03-6383-5702

【製造販売業者の名称及び住所等】

第3種製造販売業者

株式会社太陽医療品製作所

〒167-0051 東京都杉並区荻窪 5-16-7 1階

TEL. 03-6383-5701