


機械器具 43 医療用つち
一般医療機器 つち JMDNコード:11947010

ステンレスハンマー

【 禁忌・禁止 】

本製品を改造、曲げ、打刻(刻印)、切削等の二次加工をすることは、折損、事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。

【 形状、構造及び原理等 】

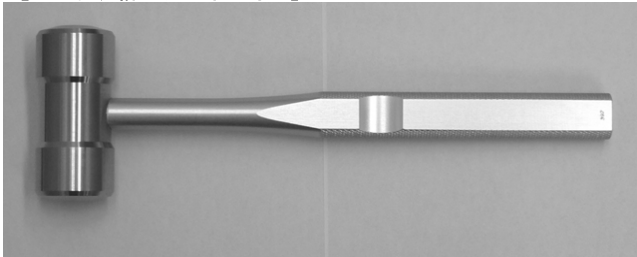

＜ 組成及び寸法 ＞

柄	アルミニウム	アルマイト仕上げ
頭	ステンレス鋼	SUS303
全長 mm	重量 g	頭部外径 mm
230	550	32

【 使用目的又は効果 】

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製(通常ステンレス製)の器具をいう。ハンドルは手のひらに適合するように設計されており、通常丸い。このハンドルは軸に向かって先細になっており、この軸の先端にヘッドがある。ハンマーヘッドは、通常、円柱形であるが、様々な形状のものもある。衝撃を吸収するために片端又は両端をゴム又はプラスチック等の物質に取り付けるハンマーヘッドもある。

【 操作方法等 】

＜使用方法＞

- (1)本製品を消毒後、柄部分を持ち、目的物に頭部分を当て、打ち込みを行う。
- (2)使用後は洗浄を行う。

＜重要な基本的注意＞

- (1)使用前に必ず消毒後、使用してください。
- (2)頭部の平面以外で打ち込みを行わないでください。

**【 使用上の注意 】

＜重要な使用上の注意＞

- (1)使用時に、必要以上の力でたたかないで下さい。柄部の破断等の破損の恐れがあります。
- (2)頭部の平面以外(特に柄部)で叩いた場合は本製品の柄部等に損傷を与えている可能性がありますので使用を中止して下さい。

＜不具合・有害事象＞

- (1)重大な不具合・有害事象

・金属疲労による破損

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1)温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2)使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。

*【 保守・点検に係る事項 】

- (1)使用後は必ず洗浄し十分に乾燥させてください。そのままにしておくと、腐蝕、錆等の原因となります。
- (2)使用後は必ず破損の有無を確認し、万一、破損部が体内に脱落した恐れのあるときは直ちに除去してください。
- (3)使用前には必ず汚れ、傷、変形等の異常がないか確認してください。頭部と柄部の接続部は特に力のかかる場所であるので良く確認してください。
- (4)消毒の必要があるときは、アルコール清拭消毒を行いオートクレーブ滅菌は行わないで下さい。
- (5)アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (6)金属たわし、クレンザー等は器具の表面を傷める恐れがありますので使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所

電話：026-245-1576