

機械器具58 整形用器具器械
一般医療機器 骨手術用器械 JMDNコード:70962001


単式線鋸誘導子

【 禁忌・禁止 】

(1) 本製品を改造、曲げ、打刻（刻印）等の二次加工をすることは、折損事故等の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
(2) 本製品は曲げて使用するものです。金属疲労等により折損することがあります。次のようなときは使用しないで下さい。

- ① 亀裂のできたとき
- ② メッキの剥れがあったとき
- ③ 曲げたときに表面に凹凸を感じたとき
- ④ 曲げたときに硬く感じたとき
- ⑤ その他異常を感じたとき

【 形状、構造及び原理等 】

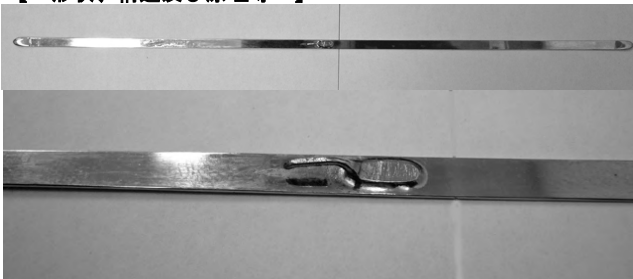

＜ 組成 ＞

本 体	リン青銅板	クロムメッキ仕上げ
引 掛	鋼	クロムメッキ仕上げ

＜ 寸法 ＞

全 長	34cm
幅	5mm
厚 さ	1.6mm（先端部）

【 使用目的又は効果 】

骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械をいう。手動式のものに限る。本品は再使用可能である。

* 【 操作方法等 】

＜使用方法＞

- (1) 必要に応じ、本製品を洗浄後、酸化エチレンガス滅菌する。
- (2) 本製品の引掛に線鋸を引っ掛ける。
- (3) 多数個あけた穴の間を本製品を曲げて潜らせる。
- (4) 本製品を移動して線鋸を誘導する。

＜使用方法に関する使用上の注意＞

- (1) 必要に応じて使用前に本製品を消毒後、使用してください。

** 【 使用上の注意 】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 使用後は必ず洗浄し十分に乾燥させてください。そのままにしておくと、腐蝕、錆等の原因となります。
- (2) 使用後は必ず破損の有無を確認し、万一、破損部が体内に脱落した恐れのあるときは直ちに除去してください。
- (3) 本製品は金属疲労により折損することがあります。強度、安全性を考慮し、使用してください。

(4) 本品がハイリスク手技に使用された場合は、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。

(5) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその感染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

＜不具合・有害事象＞

- (1) 重大な不具合・有害事象
・破損、切断

【 保管方法及び有効期間等 】

- (1) 温度及び湿度の高い場所での貯蔵を避けて下さい。
- (2) 使用後は腐蝕防止のため、必ず洗浄、乾燥して下さい。

【 保守・点検に係る事項 】

- (1) 使用前後には必ず汚れ、傷、変形等の異常がないか確認してください。
- (2) アルカリ、酸性洗剤、消毒剤等は本器を腐蝕させる恐れがありますので使用しないで下さい。
- (3) 金属たわし、磨き粉等は本製品の表面を傷つけ、メッキのはがれ、損傷等の原因となりますので使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者の名称：株式会社大和製作所
電話：026-245-1576