

類別器具機械 医療用はさみ 35

一般的名称 はさみ 35325001

販売名 プラムマイクロ剪刀

【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【構成】 マルテンサイトステンレス鋼 SUS420J”

【形状・構造等】

村中医療器(株)『ムラナカ総合カタログ』に準ずる。

品番・コード	品 名
S-1	プラムマイクロ剪刀 全長 225mm 有効長 125mm 微弯バヨネット
S-2	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 有効長 60mm 微弯バヨネット
S-3	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 鈍先・直ストレート
S-4	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 鈍先・微弯ストレート
S-5	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 刃先小・直バヨネット
S-6	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 刃先小・微弯バヨネット
S-7	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 有効長 65mm 刃先小・直バヨネット
S-8	プラムマイクロ剪刀 全長 160mm 有効長 65mm 刃先小・微弯バヨネット
S-9	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 95mm 強弯バヨネット
S-10	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 95mm 微弯バヨネット

W-1	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 鈍先・直バヨネット
W-2	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 鈍先・下向きバヨネット
W-3	プラムマイクロ剪刀 全長 195mm 有効長 100mm 鈍先・微弯バヨネット
PS-1510	プラムマイクロ剪刀 全長 150mm 直
PS-1520	プラムマイクロ剪刀 全長 150mm 弯曲

【使用目的】

本品は、外科手術器具です。

【使用上の注意】

- 1, 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- 2, 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 3, 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し除去すること。
- 4, 塩素系及びヨウ素系の消毒剤等、金属腐食の原因となる成分を含む薬剤の使用をなるべく避け、使用中に付着した場合は水洗いすること。
- 5, 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電・火傷する危険があり、また器具表面を損傷するので併用しないこと。
- 6, 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染症予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。*

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1, 洗浄・乾燥後から使用するまでの保管中、良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
- 2, 滅菌後に既滅菌状態で保管する場合、再汚染を防ぐ清潔で、

かつ良好な乾燥状態が保てる場所に保管し、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄除去し、消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱い方法を守り使用すること。

【包装】1本／1箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所

本社 東京都台東区谷中 3-4-4

Tel 03-3821-0249 Fax03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター

本社 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

Tel 0725-53-5541 Fax 0725-53-5641