

類別 器具器械（30） 結紮器及び縫合器

一般的名称 持針器 12726010

販売名 プラムマイクロ持針器

【禁忌禁止事項】

製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【構成】 マルテンサイトステンレス鋼 SUS420J2

【形状・構造等】

村中医療器(株)カタログに準ずる。

品番	品 名
PH-1530	プラムマイクロ持針器 直全長 150 mm
PH-1540	プラムマイクロ持針器 弯曲全長 150 mm
特注	病院の症例、部位に対応

【使用目的】

本品は、外科手術器具です。

【使用上の注意】

- 1、 本品を使用するにあたり、手技と器具に対する適切な理解が必要です。手技に習熟した方以外は使用しないでください。
- 2、 洗浄液は常に新しいものを使用してください。
- 3、 本品が熱を持っているときは、可動部を動かさないでください。
- 4、 本品を洗浄後は、速やかに水気を切り、乾燥を十分に行ってください。
- 5、 本品を金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤でのご使用は避けてください。
- 6、 洗浄中にたんぱく質の凝固を防ぐため、水温は 45 度以下にしてください。
- 7、 使用する洗剤、そして消毒剤を組み合わせた洗浄剤の使用方法は、そのメーカーの使用指示を遵守してください。

8、 超音波洗浄機を使用する場合、その原理からキャビテーションによるマイクロジェット波により、器具に損傷を与えることがあります。

メーカーの指示に従った上でご使用ください。

9、 本品は未滅菌です。使用前に傷などが付いていないかご確認の上、ご使用ください。

10、 本品に対する機械特性を十分ご理解の上で、症例及び部位に対応できるサイズを選択してください。

11、 製品本来の使用目的と違う用途で使用しないでください。

12、 オートクレーブをかけて滅菌を行う場合、ラチェットを開放して行ってください。

13、 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染症予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。*

【保管管理方法】

- 1、 滅菌前に器具を保護する理由により、水溶性の潤滑防錆剤を塗布してください。
- 2、 洗浄後は、かじりの原因となりますので、出来るだけ部位を動かさないでください。
- 3、 本品が熱を持っている場合、必ず常温に戻した後、可動部を動かしてください。
- 4、 本品は繊細且つ精密に作られています。粗雑な取り扱いが器具の寿命を著しく低下させます。
- 5、 本品を保管する際は、高温多湿を避け、塵や埃の無い清潔な場所に保管してください。
- 6、 医用機器の使用保守管理責任は、使用者側にあります。本品を安全により長い間ご使用頂くために、以上のことをご理解した上で、保守定期点検は必ず行ってください。

【包装】 1 本／箱

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所

本社 東京都台東区谷中 3-4-4

TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター

本社 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5541 FAX 0725-53-5641