

販売名 プラム 上山式深部用ピンセット プレミアム

【禁忌・禁止】

本製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
また、購入後の本製品への二次的加工は行わないこと。

【形状・構造等】

本製品は DLC コーティングを施しているため、硬質でかつ、耐磨耗性、化学的安定性、表面平滑性に優れている。
その他構造等は村中医療器(株)『ムラナカ総合カタログ』に準ずる。

品番	品名	規格
KP-P01	プラム上山式深部用ピンセット， 直，有効長 9cm，背骨付き，プレミアム	全長 200mm
KP-P02	プラム上山式深部用ピンセット， 45°，先端 1.5mm，有効長 9cm， 背骨付き，プレミアム	全長 200mm

【使用目的】

本品は、外科手術器具です。

【使用上の注意】

- 禁忌・禁止
 - 使用目的以外に使用しないこと。
 - 本品の二次的加工をしないこと。
 - 電気メスを用いた接触凝固は行わないこと。術者が感電・熱傷の危険又は器具表面を損傷する可能性がある。
- 重要な基本的注意
本品をクロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
- その他の注意
器具を保護する保守油が塗布されているので、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと油が付着したまま高压蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある。
- 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染症予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。*

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
- 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理する。

【保守・点検に係る事項】

- 洗浄・消毒、滅菌
 - 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒する。
 - 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。中性洗剤を推奨する。酸性及びアルカリ性洗剤は、アルミニウムを腐食させる原因となることがある。
 - 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
 - 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
 - 仕上げすすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
 - 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
- 点検
滅菌前・使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検する。

【包装】1 本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社 高山医療機械製作所
本社 東京都台東区谷中 3-4-4
TEL 03-3821-0249 FAX 03-3821-0344

【販売元の名称及び住所】

村中医療器株式会社 総合センター本社
本社 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2
TEL 0725-53-5541 FAX 0725-53-5641