


## 手術台用眼科枕 DR-JSTM-BHN

### 【警告】

- 患者および使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部や可動部の周辺に近寄らせないこと。  
[挟まれて人身事故の原因になります。]
- 枕部の調節箇所が確実に固定されているか確認すること。  
[本製品を使用する前に枕部の各部が適切な位置で確実に固定されていることを確認してください。固定不良により使用中にはずれたり、患者の姿勢が変わると事故の原因になります。]

### 【形状・構造及び原理等】

〈装置外観図〉

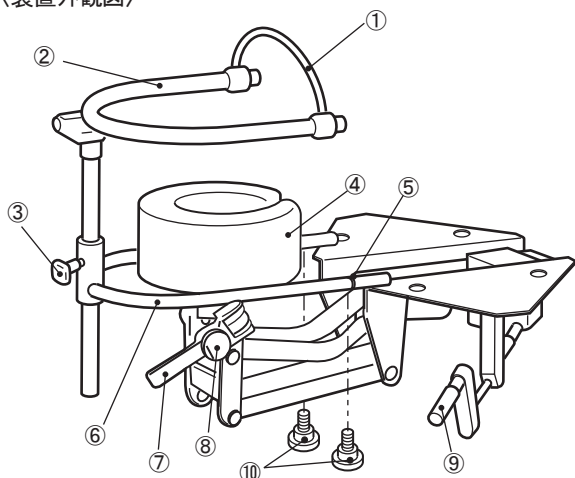

- ①リヒカ ②リストレスト ③リストレスト固定ノブ ④枕  
⑤ミゾ ⑥リストレストブラケット ⑦ロックレバー ⑧ノブ  
⑨ハンドル ⑩リストレストブラケット固定ノブ

〈性能〉

- (1) 枕外形寸法…………… φ220mm  
(2) 枕昇降ストローク…………… 150mm  
(3) 枕縦転角度…………… 前後各25°  
(4) リストレスト昇降ストローク…………… 120mm

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）

温度…10℃～40℃

\* 湿度…10%～90%

\* 気圧…700hPa～1060hPa

### 【使用目的又は効果】

本製品は手術台に取付け使用する手術台用眼科枕です。

### 【使用方法等】

〈設置方法〉

- 本製品の設置は、取扱店、または当社にご依頼ください。

〈使用方法〉

- 枕の上下位置の調節  
ハンドルを向かって右に回すと枕は上昇し、左に回すと下降します。
- 枕の角度位置の調節  
ノブを上方に押し上げたまま、ロックレバーを手前に引いてロックを解除すると、枕の角度調節をすることができます。  
位置調節ができた後ロックレバーを押して、確実に枕をロックしてください。
- リストレストの調節  
リストレストはリストレスト固定ノブ・リストレストブラケット固定ノブをゆるめると前後・上下に調節することができます。

### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 枕部には乗ったり、腰をかけたりしないこと。転倒による人身事故や物損事故などの原因になります。
- リストレストブラケットは、手術台本体の天板に差込み、リストレストブラケット固定ノブで確実に固定されていることを確認してください。また、ミゾより先に引き出して使用しないでください。
- ロックレバーを手前に引いて解除するとき、枕が急に下がる可能性があります。ロックレバーを解除するときは枕を確実に持って操作してください。
- ハンドルを折りたたむときは、指を挟まないように注意してください。
- 本製品は出荷時には滅菌・消毒などがされていないので、使用前に清拭作業を行うこと。

### ＊＊【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- 本製品の耐用期間は、正規の保守点検をした場合に限り10年間です。[自己認証（当社データ）による]
- 枕のクッション類は使用環境により異なります。

### 【保守・点検に係る事項】

- 本製品および部品は必ず日常点検を行うこと。
  - 設置状態の確認
  - 枕の上下位置調節操作性の確認
  - 枕の角度調節操作性の確認
  - リストレスト、リストレストブラケットの調節操作性の確認
  - 外観部品の状態確認
- しばらく使用しなかった本製品を再使用するときは、使用前に清掃を行い、清拭作業を行った後、必ず本製品が異常なく安全に作動することを確認すること。

### ●本製品を廃棄するとき

本製品や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を十分行い、その時点での法規制にしたがい、適切な処理をしてください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラベルモント株式会社

TEL：06-6212-3620

販売業者