

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

自在型側部支持器

【警告】

- ① 本器具を使用する際は、ロックノブ、ロックハンドル、クランプノブが確実に固定されているか確認してください。確実に固定されていないまま使用しますと、器具が動いたり落下するなどの原因になります。
- ② 操作時は必ず適切に介助をしつつ行ってください。事故を起こすおそれがあります。

**【形状・構造及び原理等】


1) 作動原理

手動により、胸受けクッション及びサポートポストを任意の位置で固定する。

*2) 外観図

本体

自在型側部支持器(小)

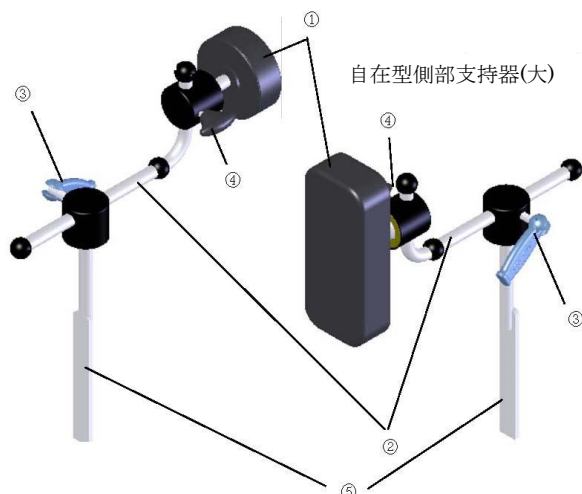

①胸受けクッション (大) (小)


②胸受けアーム

③ロックハンドル

④ロックノブ

⑤サポートポスト

クランプ

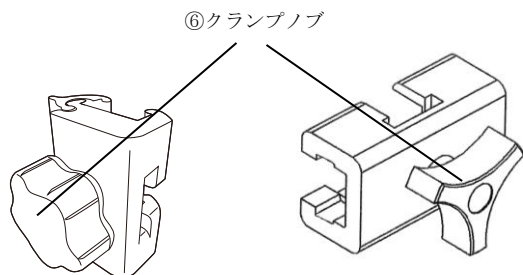

⑥クランプノブ

3) 機器の仕様

- ・胸受けアームを固定しているロックハンドル操作により、胸受けアームを横方向に360°回転させることができる。
- ・ロックノブ操作により、胸受けクッションを360°回転させることができる。

【使用目的又は効果】

手術台に取り付け、患者の胸を支える為に使用する。

【使用方法等】

＜取付及び操作方法＞

- ・本器具を正しく理解し使用して頂く為、下記の説明に従ってください。
- ・医師、看護師、その他の医療従事者等の使用者は、他の手術用器具と同様に、本器具を臨床使用する前に十分に練習使用を行ってください。
- ・日頃から、製品の使用に十分に慣れるよう心がけてください。

1. クランプを手術台のサイドレールに取り付け、上からサポートポストを挿入します。
2. サポートポストを希望の高さに調整し、クランプノブを締めて固定します。
3. ロックハンドルのロックを解除し、胸受けアームを希望の位置に動かし、ロックハンドルを締めて固定します。
4. ロックノブのロックを解除し、胸受けクッションを希望の位置に動かし、ロックノブを締めて固定します。

**【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 当社指定の装置以外は、組み合わせて使用しないこと。
- 2) 本器具にぶら下がったり、他の機器を吊り下げたりしないでください。事故や破損のおそれがあります。
- 3) 本器具を使用する際は、各部が正確かつ正常に作動することを確認してください。
- 4) ゆるみ、ガタなどに十分注意し、おかしいと感じたら使用を中止してください。

**【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

10年間。〔自己認証(社内データ)による〕

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

****【保守・点検に係る事項】**

1) 使用者による保守点検事項

- ① 使用後は清拭作業を行い、機器を清潔に保ち使用すること。
(清拭作業が不十分な場合、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。機器を清潔に保ちご使用ください。)
- ② 使用可能な洗浄・消毒液の一例として、アルコール(70%)、4級アンモニウム系…塩化ベンザルコニウム(0.1～0.2%)をご使用ください。
- ③ 金属腐食性の強い消毒液(ポビドンヨード、次亜塩素酸ナトリウムなどは絶対に使用しないこと。

2) 業者による保守(定期)点検事項

業者による保守点検は当社または当社の指定する業者に依頼してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:タカラベルモント株式会社 T E L: 06-6212-3620 製造業者: アレン メディカル システムズ インク(アメリカ合衆国) Allen Medical Systems Inc. (USA)
販売業者