

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

フレキシブルアームボード

【警告】

- ① 本器具を使用する際は、クランプハンドル、ボードハンドル、抑制バンドが確実に固定されているか確認してください。確実に固定されていないまま使用すると、器具が動いたり落下するなどの原因になります。
- ② 操作時は必ず適切に介助をしつつ行ってください。事故を起こすおそれがあります。
- ③ アームボード延長スリーブを引き出す際は、勢いよく強く引っ張らないようにしてください。アームボード延長スリーブがアームボードから外れるおそれがあります。


*【形状・構造及び原理等】

1) 作動原理

手動により、アームボード及びサポートロッドを任意の位置で固定できる。

2) 外観図

本体

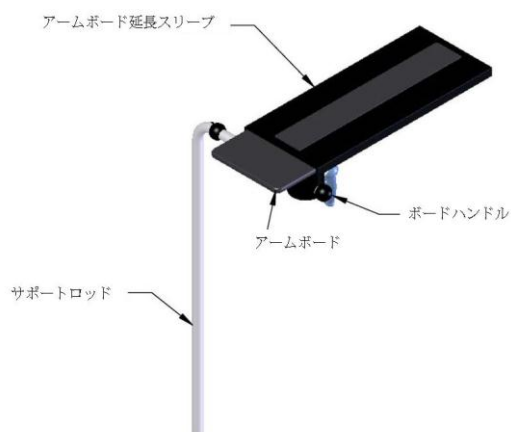

クランプ



3) 機器の仕様

アームボード延長スリーブの長さ調整 0mm～177.8mm

【使用目的又は効果】

手術台に取りつけ、腕を支える為に使用する。

【使用方法等】

＜取付及び操作方法＞

- ・本器具を正しく理解し使用して頂く為、下記の説明に従ってください。
- ・医師、看護師、その他の医療従事者等の使用者は、他の手術用器具と同様に、本器具を臨床使用する前に十分に練習使用を行ってください。
- ・日頃から、製品の使用に十分に慣れるよう心がけてください。

1. クラмпを手術台のサイドレールに取りつけ、上からサポートロッドを挿入します。
2. クラмпハンドルを十分に締め付けて、サポートロッドが回転しないようにします。
3. アームボード延長スリーブを引き、長さの調節を行います。
4. ボードハンドルのロックを解除し、アームボードを希望の位置に動かします。
5. ボードハンドルを十分に締め付けて、調整した位置でアームボードを固定します。
6. クラмпハンドルのロックを解除し、サポートロッドを上下させ高さの調節を行い、希望の位置でクラмпハンドルを十分に締め付けます。
7. 抑制バンドで腕を固定します。

*【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 当社指定の装置以外は、組み合わせて使用しないこと。
- 2) 本機器にぶら下がったり、他の機器を吊り下げたりしないでください。事故や破損のおそれがあります。
- 3) 本器具を使用する際は、各部が正確かつ正常に作動することを確認してください。
- 4) ゆるみ、ガタなどに十分注意し、おかしいと感じたら使用を中止してください。

*【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

10年間。〔自己認証(社内データ)による〕

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

***【保守・点検に係る事項】**

1) 使用者による保守点検事項

- ① 使用後は清拭作業を行い、機器を清潔に保ち使用すること。
(清拭作業が不十分な場合、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。機器を清潔に保ちご使用ください。)
- ② 使用可能な洗浄・消毒液の一例として、アルコール(70%)、4級アンモニウム系…塩化ベンザルコニウム(0.1~0.2%)をご使用ください。
- ③ 金属腐食性の強い消毒液(ポピドンヨード、次亜塩素酸ナトリウムなどは絶対に使用しないこと。

2) 業者による保守(定期)点検事項

業者による保守点検は当社または当社の指定する業者に依頼してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: タカラベルモント株式会社 T E L: 06-6212-3620 製造業者: アレン メディカル システムズ インク(アメリカ合衆国) Allen Medical Systems Inc. (USA)

販売業者
