

## 上肢台M


### 【禁忌・禁止】

#### 〈使用方法〉

- ①当社及びタカラ Belmont 製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する手術台以外には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]
- ②サイドレールの端部から 30mm 以内には、取り付けないこと。誤って上肢台本体にぶつかる等して、ずれた時に落下するおそれがあります。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 外観図

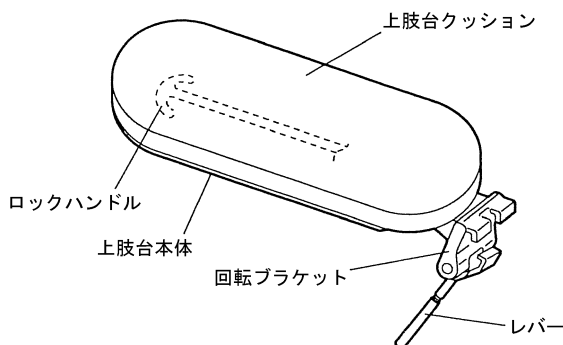

#### \*2) 機器の仕様

- ①レバー操作により手術台のサイドレールへの取り付け及び取り外しができる。
- ②ロックハンドル操作により左右各 22.5° 毎に 90° まで回転させることができる。
- ③上肢台用フックをサイドレールに引っ掛けることができる。

#### \*④許容負荷荷重 :

上肢台本体中央部において垂直方向に 100N (10kgf)

#### 〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)  
周囲温度 10~40℃ 相対湿度 30~75% 気圧 700~1060hPa

### 【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、麻酔時に患者の腕を手術台のテーブルトップと水平に支える、あるいは点滴等の行為をする為に使用する。

### 【使用方法等】

#### 1) 取付・設置 (組立・据付)

- ①レバーを引き、手術台のサイドレールに回転ブラケットのツメを取り付けた後、レバーを戻し、サイドレール下側へ取り付け固定します。

#### 2) 操作方法又は使用方法

- ①ロックハンドルを引いて左右各 90° の角度で回転させます。
- ②任意の位置でロックハンドルを戻し固定させます。(固定角度は 22.5° 間隔)
- ③上肢台用フック取付品はロックハンドルを引いて、90° 回転させサイドレールに引っ掛けます。

### 【使用上の注意】

#### \*〈重要な基本的注意〉

- ①サイドレールに確実に固定されているか確認すること。確実に固定されずに使用されますと、手術中に不意に落下し思わぬ事故の原因になります。
- ②レバー部に使用者や患者が意図せず触れることのないよう注意すること。機器が動いたり、落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ③上肢台本体にもたれたり、横方向に力を加えないこと。上肢台がサイドレール上をスライドしたり、落下するおそれがあります。
- ④上肢台本体の上に腰掛けたり、過度の荷重をかけたりしないこと。機器の破損や、落下事故及び転倒事故の原因になります。
- ⑤機器を取り付けたまま手術台を操作するときは、機器の周辺に人や物がないか必ず確認すること。確認せずに使用しますと思わぬ事故の原因になります。
- ⑥上肢台を手術台のサイドレールに取り付けた状態でテーブルトップを縦転、及び背杵(腰杵)を屈曲させると上肢台が滑る場合がありますのでご注意ください。
- \*⑦上肢台本体中央部において、垂直方向に許容負荷荷重 (10kgf) 以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑧使用後は清掃作業を行い、機器を清潔に保ち使用すること。清掃作業が不十分な場合は、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。機器を清潔に保ちご使用ください。
- ・使用可能な洗浄・消毒液の一例として、アルコール (70%)、4 級アンモニウム系・塩化ベンザルコニウム (0.1~0.2%) をご使用ください。
- ⑨金属腐食性の強い消毒液 (ポピドンヨード、次亜塩素酸ナトリウムなど) は使用しないこと。[本体の腐食の防止]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〈保管方法〉

##### ・保管環境

周囲温度 -20~60℃ 相対湿度 10~90% 気圧 500~1060hPa

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

〈耐用期間〉

- ・ 本機の耐用期間は 10 年です。（自己認証（当社データ）による）

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

- ・ クッション部品は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検（日常点検）〉

- ・ サイドレールへの接続状態の確認。
- ・ 外観の破損状態の確認。
- ・ 取付状態の確認。
- ・ 各部が正確かつ安全に作動することの確認。
- ・ ゆるみ、ガタつき、傾き、臭気などの確認。

以上について点検を行い、少しでも「おかしいな？」と感じたらすぐに使用を中止すること。

しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に清掃を行なった後、必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施する場合は、弊社または医療機器修理業者などの有資格者へ依頼してください。

〈消耗品〉

ご使用によって磨耗や劣化、外観の変化、破損が予測される部品です。修理や交換の場合は保証の対象外となります。

- ・ 上肢台クッション

●機器を廃棄するとき

機器や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を十分行い、その時点での法規制に従い、適切な処理をしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL：06-6499-3461

販売業者