

挙上器M

【警告】

機器の動作範囲内に人及び物、又手や指がないか必ず確認すること。[挟み込みによる怪我の防止]


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

当社及びタカラ Belmont 製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する手術台以外には取り付け使用しないこと。[安全性が保証できないため]

【形状・構造及び原理等】

1) 外観図

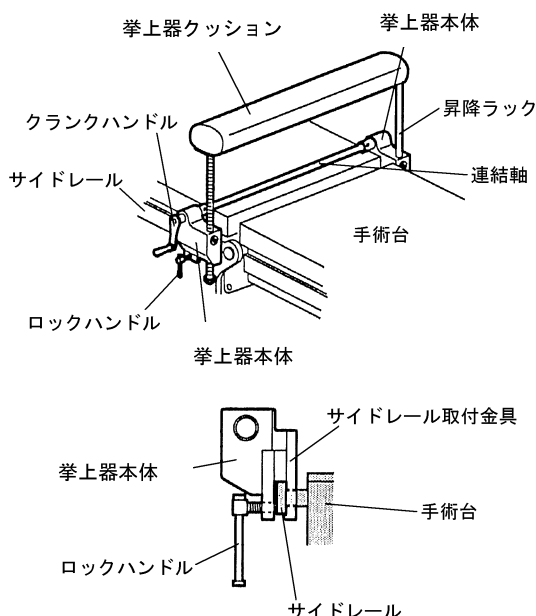

2) 機器の仕様

- ① サイドレール取付金具のロックハンドル操作により、手術台に固定させることができます。
- ② クランクハンドル操作により、挙上器クッションを 150mm の範囲で昇降させることができます。
- ③ 許容負荷荷重：挙上器クッション中央部に 700N (70kgf)

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)
周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～75% 気圧 700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、患者の腹部、腰部、その他部分的に身体を持ち上げる為に使用する。

【使用方法等】

1) 取付・設置 (組立・据付)

- ① 手術台の上面よりサイドレール (左右) に挙上器本体 (左右共) のサイドレール取付金具を取り付けます。
- ② 左右の挙上器本体の位置を揃えて、挙上器本体の左右それぞれのロックハンドルを時計回りに廻して固定します。
- ③ クランクハンドル操作で挙上器クッションが 150mm の範囲で昇降する事を確認します。

2) 操作方法又は使用方法

- ① 挙上器クッションを上昇させる時は、クランクハンドルを左右どちらかの挙上器本体に取り付け、クランクハンドルを時計回りに廻します。
- ② 挙上器クッションを下降させる時は、クランクハンドルを反時計回りに廻します。
- ③ 操作後は挙上器本体からクランクハンドルを取り外します。

【使用上の注意】

- ① 挙上器本体及びロックハンドルが確実に固定されているか確認すること。確実に固定されていないまま使用しますと、機器が動いたり落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ② 手術中はクランクハンドルを取り外すこと。クランクハンドルを取り付けたまま使用しますと、衣服等が引っ掛かるなどの思わぬ事故の原因になります。
- ③ 機器の操作部に意図せず使用者や患者が触れることのないよう注意すること。機器が動いたり、落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ④ 挙上器クッション中央部に許容負荷荷重 (70kgf) 以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑤ 使用後は清拭作業を行い、機器を清潔に保ち使用すること。[清拭作業が不十分な場合は、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。機器を清潔に保ちご使用ください。]
 - ・使用可能な洗浄・消毒液の一例として、アルコール (70%)、塩化ベンザルコニウム (0.1～0.2%) をご使用ください。
- *⑥ 消毒の際、金属腐食性の強い消毒液 (ポビドンヨード (イソジン液)) などは絶対に使用しないこと。
[故障の原因となるおそれがあります。]
- *⑦ 消毒に次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は以下の注意事項を守ること。
 - ・噴霧はしない。
 - ・次亜塩素酸ナトリウム (0.1%) を含ませたやわらかい布で拭く。
 - ・消毒を行ったあとは、アルコールによる拭き取りを行う。
[色落ちやサビの原因になります。]

***【保管方法及び有効期間等】**

〈耐用期間〉

10 年 （自己認証（当社データ）による）

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った
場合に限る。

クッション部品は使用環境によって異なります。

***【保守・点検に係る事項】**

〈使用者による保守点検（日常点検）〉

- ・ サイドレールへの接続状態の確認。
- ・ 外観の破損状態の確認。
- ・ 取付状態の確認。
- ・ 各部が正確かつ安全に作動することの確認。
- ・ ゆるみ、ガタ、傾き、臭気などの確認。

以上について点検を行い、少しでも「おかしいな？」と感じたらすぐに使用を中止すること。

使用後、清拭作業を行う。（使用可能な洗浄・消毒液の例として、アルコール（70%）、塩化ベンザルコニウム（0.1～0.2%）があります。）

〈業者による保守点検事項〉

業者による保守点検を実施するときは、当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

〈消耗品〉

ご使用によって磨耗や劣化、外観の変化、破損が予測される部品です。修理や交換の場合は保証の対象外となります。

- ・ 挙上器クッション

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 タカラメディカル株式会社 TEL：06－6499－3461
販売業者