

挙上器M

【警告】

機器の動作範囲内に人及び物、又手や指がないか必ず確認すること。[挟み込みによる怪我の防止]


**【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

当社及びタカラ Belmont 製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する製品以外には取り付け使用しないこと。[安全性が保証できないため]

**【形状・構造及び原理等】

1) 外観図

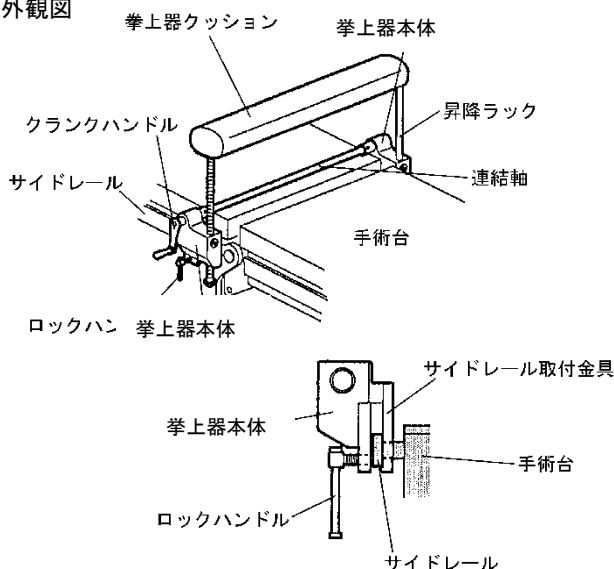

2) 機器の仕様

- ①サイドレール取付金具のロックハンドル操作により、手術台に固定させることができます。
- ②クランクハンドル操作により、挙上器クッションを 150mm の範囲で昇降させることができます。

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)
周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～75% 気圧 700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、患者の腹部、腰部、その他部分的に身体を持ち上げる為に使用する。

**【使用方法等】

〈使用方法〉

機器の詳細な使用方法是付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

**

*【使用上の注意】

- ①挙上器本体及びロックハンドルが確実に固定されているか確認すること。確実に固定されていないまま使用しますと、機器が動いたり落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ②手術中はクランクハンドルを取り外すこと。クランクハンドルを取り付けたまま使用しますと、衣服等が引っ掛かるなどの思わぬ事故の原因になります。
- ③機器の操作部に意図せず使用者や患者が触れることのないよう注意すること。機器が動いたり、落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ④挙上器クッション中央部に許容負荷荷重 (700N) 以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑤お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年です。(自己認証 (当社データ) による)
- ※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。
- ・クッション部品は使用環境によって異なります。

**

*【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検 (日常点検)〉

頻度	内容
使用前	設置状況の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	その他の確認

**〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL : 06-6499-3461

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。