

## 側臥位用上肢台M


### 【禁忌・禁止】

#### 〈使用方法〉

当社及びタカラ Belmont 製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する手術台以外には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 外観図

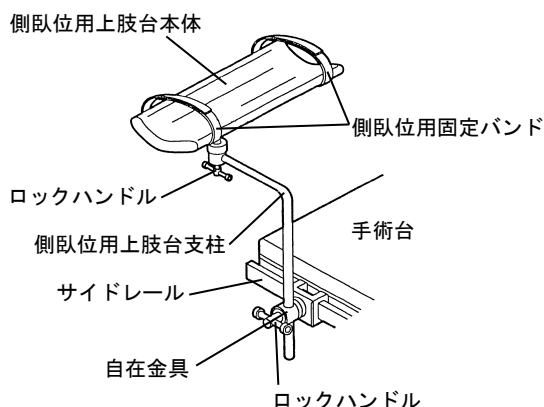

#### 2) 機器の仕様

- ①自在金具のロックハンドル操作により、側臥位用上肢台本体を 300mm の範囲で昇降させることができます。
- ②自在金具のロックハンドル操作により、側臥位用上肢台支柱を横方向及び縦方向に 360° 回転させることができます。
- ③側臥位用上肢台本体のロックハンドル操作により、側臥位用上肢台本体を 360° 回転及び 30° 傾斜させることができます。
- ④許容負荷荷重: 側臥位用上肢台本体中央部に 250N (25kgf)

#### 〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)  
周囲温度 10~40℃ 相対湿度 30~75% 気圧 700~1060hPa

### 【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、側臥位の状態で上になった腕を支える為に使用する。

### 【使用方法等】

#### 1) 取付・設置(組立・据付)

- ①自在金具を手術台のサイドレールに取り付け、上から側臥位用上肢台支柱を差し込み、自在金具のロックハンドルを時計回りに廻して固定します。
- ②各ロックハンドル操作で固定と解除が正常に作動することを確認します。

#### 2) 操作方法又は使用方法

- ①側臥位用上肢台本体を患者の位置に合わせ、自在金具のロックハンドルを時計回りに廻して固定します。
- ③側臥位用上肢台本体の角度を合わせ、側臥位用上肢台本体のロックハンドルを時計回りに廻して固定します。
- ④腕が落ちないように側臥位用固定バンドで腕を固定します。

### 【使用上の注意】

#### 〈重要な基本的注意〉

- ①各ロックハンドル及び側臥位用固定バンドが確実に固定されているか確認すること。確実に固定されていないまま使用しますと、機器が動いたり落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ②患者を乗せたままでロックハンドルを操作しないこと。側臥位用上肢台本体が急に意図せぬ角度に移動するなどの思わぬ事故の原因となります。
- ③ハンドル部に意図せず使用者や患者が触れることのないよう注意すること。機器が動いたり、落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ④側臥位用上肢台本体中央部に許容負荷荷重 (25kgf) 以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑤使用後は清拭作業を行い、機器を清潔に保ち使用すること。  
[清拭作業が不十分な場合は、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。機器を清潔に保ちご使用ください。]  
・使用可能な洗浄・消毒液の一例として、アルコール (70%)、4 級アンモニウム系・塩化ベンザルコニウム (0.1~0.2%) をご使用ください。
- ⑥金属腐食性の強い消毒液 (ポピドンヨード、次亜塩素酸ナトリウムなど) は使用しないこと。[本体の腐食の防止]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〈保管方法〉

##### ・保管環境

周囲温度 -20~60℃ 相対湿度 10~90% 気圧 500~1060hPa

#### 〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年です。(自己認証 (当社データ) による)

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

- ・クッション部品は使用環境によって異なります。

### 【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検(日常点検)〉

- ・ サイドレールへの接続状態の確認。
- ・ 外観の破損状態の確認。
- ・ 取付状態の確認。
- ・ 各部が正確かつ安全に作動することの確認。
- ・ ゆるみ、ガタ、傾き、臭気などの確認。

以上について点検を行い、少しでも「おかしいな？」と感じたらすぐに使用を中止すること。

しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に清掃を行なった後、必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施する場合は、弊社または医療機器修理業者などの有資格者へ依頼してください。

〈消耗品〉

ご使用によって磨耗や劣化、外観の変化、破損が予測される部品です。修理や交換の場合は保証の対象外となります。

- ・ 側臥位用上肢台クッション

### ●機器を廃棄するとき

機器や交換した部品を廃棄するときは、感染予防を十分行ない、その時点での法規制に従い、適切な処理をしてください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 製造販売業者<br>タカラメディカル株式会社<br>TEL : 06-6499-3461 |
| 販売業者                                         |