

上腕ホルダーM

*【禁忌・禁止】


〈使用方法〉

当社及びタカラ Belmont 製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する製品以外には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]


【形状・構造及び原理等】

1) 外観図


垂直型

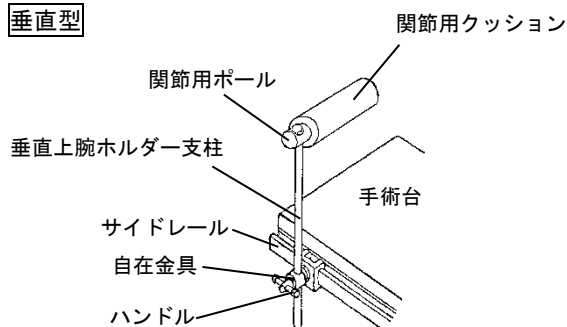

屈曲型

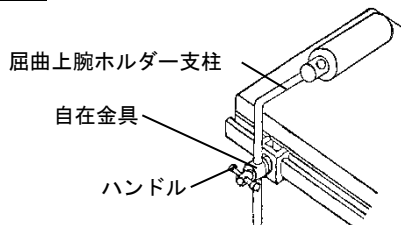

可変型

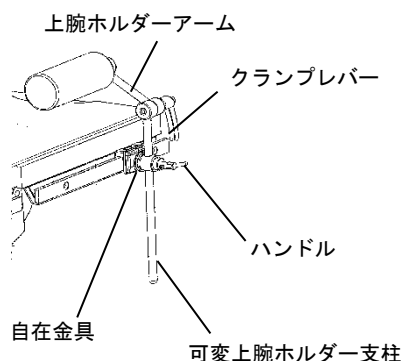

* 2) 機器の仕様

垂直型

- ①自在金具のハンドル操作により、垂直上腕ホルダー支柱を手術台のサイドレールに取り付けることができます。
- ②自在金具のハンドル操作により、垂直上腕ホルダー支柱の取付高さを調節し、前後に回転させることができます。

③自在金具のハンドル操作により、垂直上腕ホルダー支柱を 360° 回転させることができます。

④自在金具のハンドル操作により、垂直上腕ホルダー支柱の取付高さを 350mm の範囲で調節できます。

屈曲型

①自在金具のハンドル操作により、屈曲上腕ホルダー支柱を手術台のサイドレールに取り付けることができます。

②自在金具のハンドル操作により、屈曲上腕ホルダー支柱の取付高さを調節し、前後に回転させることができます。

③自在金具のハンドル操作により、屈曲上腕ホルダー支柱を 360° 回転させることができます。

④自在金具のハンドル操作により、屈曲上腕ホルダー支柱の取付高さを 320mm の範囲で調節できます。

可変型

①自在金具のハンドル操作により、可変上腕ホルダー支柱を手術台のサイドレールに取り付けることができます。

②自在金具のハンドル操作により、可変上腕ホルダー支柱の取付高さを調節し、前後に回転させることができます。

③自在金具のハンドル操作により、可変上腕ホルダー支柱を 360° 回転させることができます。

④自在金具のハンドル操作により、可変上腕ホルダー支柱の取付高さを 320mm の範囲で調節できます。

⑤クランプレバーの操作により上腕ホルダーアームを 315° 回転させることができます。

〈動作保証条件〉

下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)
周囲温度 10~40℃ 相対湿度 30~75% 気圧 700~1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、側臥位の患者の上腕を支える為に使用する。

*【使用方法等】

〈使用方法〉

機器の詳細な使用方法は付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①自在金具のハンドルが確実に固定されているか確認すること。確実に固定されずに使用されますと、機器が動いたり落下するなどの思わぬ事故の原因になります。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

- ②患者の上腕を支えたままでハンドルの操作をしないこと。
垂直上腕ホルダー支柱又は屈曲上腕ホルダー支柱、可変上腕ホルダー支柱が急激に曲がり、思わぬ事故の原因になります。
- ③患者の上腕を支えたままでクランプレバーの操作をしないこと。可変上腕ホルダー支柱が急激に曲がり、思わぬ事故の原因になります。
- ④ハンドル部に意図せず使用者や患者が触れることのないよう注意すること。ハンドルがゆるむことにより、機器が動いたり落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
- ⑤関節用クッション中央部に許容負荷荷重（100N）以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑥お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年です。（自己認証（当社データ）による）

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

- ・クッション部品は使用環境によって異なります。

*【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検(日常点検)〉

頻度	内容
使用前	設置状況の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	その他の確認

* 〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL：06-6499-3461