

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDNコード：70469000
自在型頭部受け


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

当社製及びタカラ Belmont 製の手術台以外には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

【形状・構造及び原理等】

1) 外観図

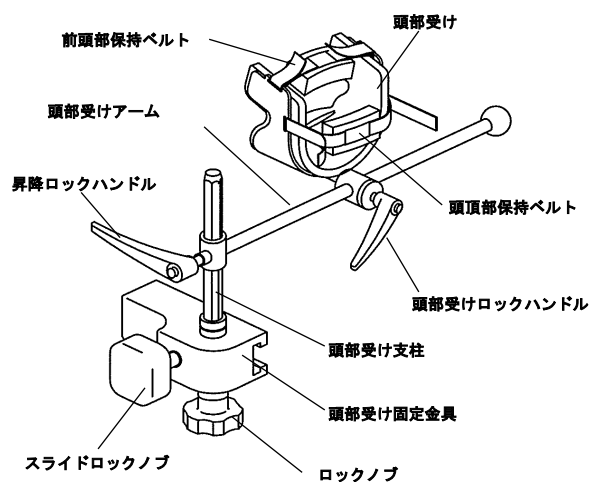

2) 機器の仕様

許容負荷荷重：頭部受け部に 100N (10kgf)

〈使用保証条件〉

下記の条件にて使用すること。

周囲温度 10～40℃

相対湿度 10～100% 結露なきこと

気圧 700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、手術及び治療時に患者の頭部を支えるために使用する。

【使用方法等】

1) 取付・設置（組立・据付）

機器の詳細な設置方法については附属の取扱説明書の操作方法の項を必ずお読みください。

2) 操作方法又は使用方法

機器の詳細な操作及び使用方法については附属の取扱説明書の操作方法の項を必ずお読みください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ①患者の体位を保持する場合は、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位の固定は患者に障害がおこるおそれがあります。]
- ②自在型頭部受けを使用する際は患者を十分に固定し縦転、横転、背板屈曲した場合患者の頭部が動かない状態に保持すること。[患者の頭部位置が変化すると、不安定な状態から障害がおこるおそれがあります。]
- ③各ハンドル及びノブが確実に固定されているか確認すること。[確実に固定されていないまま使用しますと、機器が動いたり落下するなどの思わぬ事故の原因になります。]
- ④患者の頭部を支えたまま各ハンドル、ノブを操作する時は、頭部受けを支えながらハンドル、ノブを操作すること。[頭部受けを支えずに操作しますと、頭部受けが動いて思わぬ事故の原因になります。]
- ⑤ハンドル、ノブ部に使用者や患者が触れることのないよう注意すること。[ハンドル、ノブがゆるむことにより、頭部受けが急に動くなどの思わぬ事故の原因になります。]
- ⑥頭部受け部に許容負荷荷重（10kgf）以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
- ⑦使用後は清拭作業を行い、機器を清潔に保ち使用すること。
[清拭作業が不十分な場合は、菌の発生により人体に影響を及ぼす場合があります。機器を清潔に保ちご使用ください。]
- ・使用可能な洗浄・消毒液の一例として、アルコール（70%）、4級アンモニウム系・塩化ベンザルコニウム（0.1～0.2%）をご使用ください。
- ⑧金属腐食性の強い消毒液（ポピドンヨード、次亜塩素酸ナトリウムなど）は使用しないこと。
[本体の腐食の防止]

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉

- ・本機の耐用期間は 10 年間です。（自己認証（当社データ）による）

※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

- ・クッション部品は使用環境によって異なります

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検（日常点検）〉

頻度	内容
使用前	接続状況の確認
	取付け状況の確認
	外観状況の確認

以上について点検を行い、少しでも「おかしいな？」と感じたらすぐに使用を中止してください。

〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施する場合は、弊社または医療機器修理業者などの有資格者へ依頼してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

タカラメディカル株式会社

TEL：０６－６４９９－３４６１

販売業者