

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

販売名：ピン&インサーター／エクストラクター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造等】

ステンレススチール


1. ピン・ドライバー



2. スレット・ボーン・ピン



3. フェモラル・ヘッド・リムーバブル・ピン

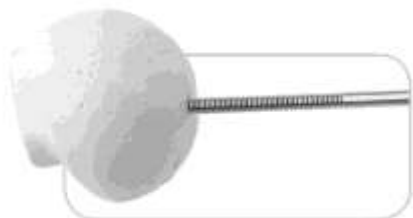

4. ボーン・ピン



5. ピンインサーター



6. ピンインサーター／エクストラクター



7. アムスタッツ・アセタブラー・エクスポート・ス・ピン・セット（ハンドル×1、ピン×2）



8. スタント・ピンエクストラクター



9. スタント ストレート ピン リムーバブル プライヤー



【使用目的又は効果】

人工股関節術等の整形外科手術にて使用する

【使用方法等】

- ピン・ドライバーの使用法

スレッド・ホール・ピン又はフェモラル・ヘッド・リムーバブル・ピンをピン・ドライバーに取り付け、ピン・ドライバーの逆側を電動ドリルのアタッチに取り付け、骨に設置します。

- ピンインサーターの使用法



ピンインサーターの先端にピンをしっかりとめ込み、木槌等を用いて目的の場所にピンを挿入します。

(上：ピン装着前 下：ピン装着後)

- ピンインサーター/エクストラクターの使用法



ピンを先端の穴に差し込みます。グリップを握るとピンがロックされますので、グリップを握った状態でピンを目的の場所に挿入して下さい。(ピンがしっかりと固定されていることを必ず確認して下さい。)

ピンを抜去する場合は、先端の穴にピンを挿入した状態で、グリップを握り、ピンを抜去して下さい。

- アムスタツ・アセプター・エクスポージャー・ピン・セット



人工股関節術の際、臼蓋付近の任意の場所にピン（上記図参照）を設置し広い視野を確保する。

【使用上の注意】

- ピンの挿入及び抜去の際には必ず付属のピンインサーター又はピンインサーター/エクストラクターを使用してください。また、ピンの挿入の際にはピンはピンインサーターにしっかりと設置されていることを確認して下さい。[ケガの原因の恐れがあるため。]

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 本製品は中空構造を有する製品が存在するため血液などが隙間に付着することが予想されます洗浄の際には血液溶解剤又は蛋白質分解酵素剤の前処理を行い洗浄、滅菌を行って下さい。[通常の洗浄では、隙間部分に付着した血液・体組織等が除去しきれない恐れがあります。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>