

類別等：機械器具（43）医療用つち
一般医療機器 つち 11947010

販売名：イノメッド・インパクトター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

金属部位：304 ステンレススチール

ハンドル部位：酢酸系共重合体

1. ソフト・インパクト・マレット



2. ユニバーサル・アセツラ・グラフト・インパクトター（先端一体型）



3. ウォーリー・ティビ・ア・パンチ



人工膝関節置換術にて、脛骨プレートをセメント固定で行う際に、脛骨側にセメントホール（アンカーホール）を作成するために使用する。

4. ジョニス マレット



【使用目的又は効果】

瞬間的かつ集中的な衝撃を与えるために用いられる。

【使用方法等】

整形外科等手術際の器械を、本製品で叩いて使用する。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 中空部分の存在するものにあつては、ブラシ等で入念に洗浄し血液等の異物が存在しないことを確認して下さい。
- 強アルカリ・強酸性洗剤は、本製品を腐食する場合がありますので、洗浄の際は医療用中性洗剤をご使用下さい。
- 臼蓋へのインパクションの際には、先端はめ込み式のインパクトターにおいては先端がしっかりとハマっていることを確認し、木槌を使用しインパクションを行って下さい。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
 - * ステンレス製品
真空脱気ブリパキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4 分間以上（推奨）
 - * デルリン樹脂を含む場合
真空脱気ブリパキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 6 分間以上（推奨）その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)
URL <http://www.innomed.net>