

販売名：イノメッド・フック・レトラクター

**【警告】**

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

**【形状・構造及び原理等】**

ステンレス・スチール  
先端の鉤の部位で組織を開創する。



- ドール カーブド ホマン アセタブラー (D6105)
- ドール ナロー ベント アセタブラー ロング/スタンダード (D6108/D6110)
- ドール ベント ホマン アセタブラー (D6112)



- ドール カーブド ブレード ベント ホマン (D6106)
- ドール カーブド ブレード ダブルベント ホマン (D6107)
- アップワード ダブルベント ホマン (D6114)



- ドール ホステリアー カプセル/サイアティックナーブ プロテクション レトラクター (右・左) (D6109-L/-R)


**【使用目的又は効果】**

組織又は解剖学的部位を分離し、臓器又は組織の露出やアクセスを確保するために用いる。


**【使用方法等】**

下記の図参照のこと


大腿骨頭展開時

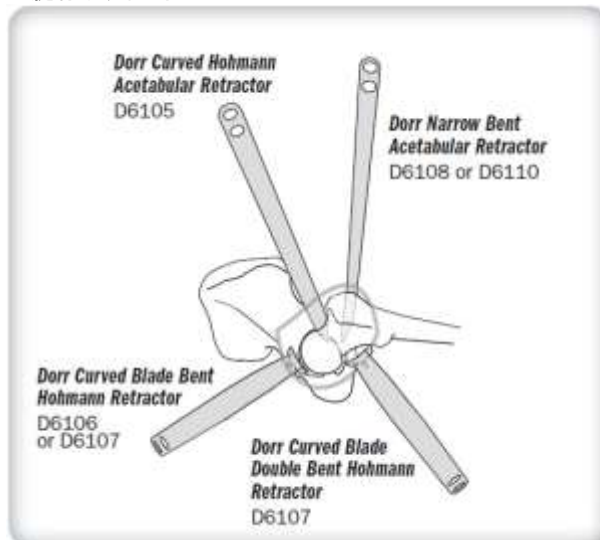

髓腔リーミング時

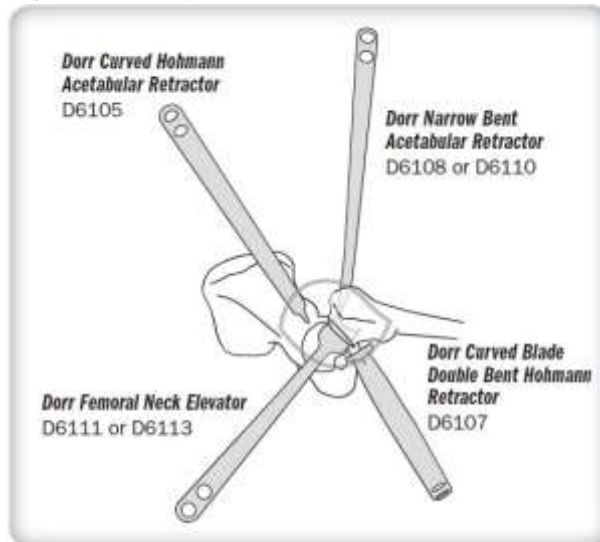

## 臼蓋骨展開時

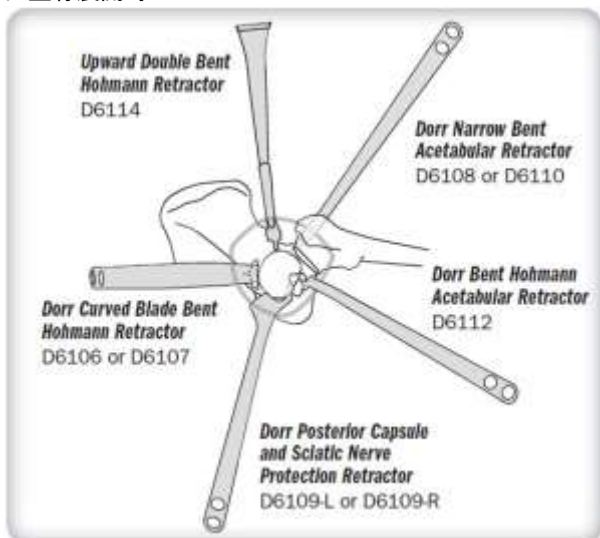

### 【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

### 【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

### 【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
  - 滅菌方法及び滅菌条件  
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌  
134℃ 4分間以上（推奨）その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1  
電話番号 03 (5644) 8711(代)  
URL <http://tact-medical.co.jp>  
製造国名：米国  
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)  
URL <http://www.innomed.net>