

類別等：機械器具 (39) 医療用鉗子
一般医療機器 手術用骨鉗子 32853000
販売名：イノメッド・ロンジュール

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール

1. オーソ・ロンジュール




2. オーソロンジュール with ピストル グリップ ハンドル




3. マッコ・スクエア・チップ・ロンジュール




4. グラスパーロンジュール

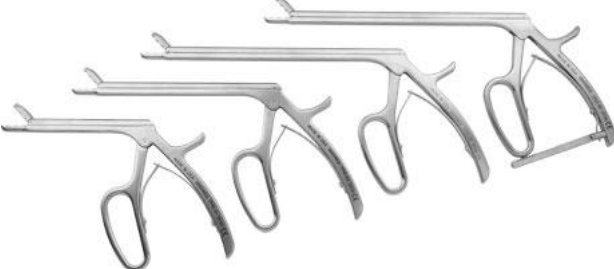

5. ハナム・ロンジュール/グラスパー

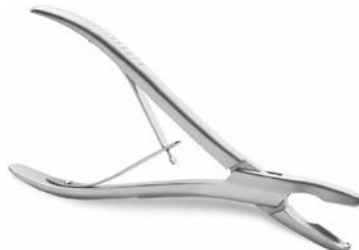

6. エキストラロング・ロンジュール

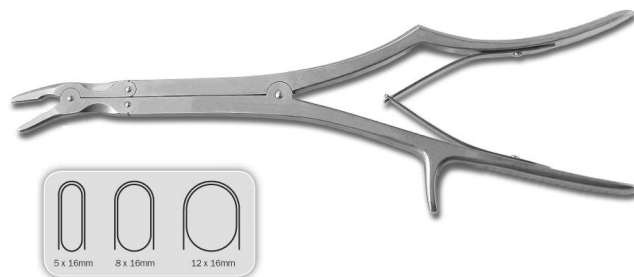

7. アンテリア ヒップ ラバール グラスパー



【使用目的又は効果】

軟骨又は骨などの硬い組織を締め付けて切断することにより除去するのに用いる。

【使用方法等】

ハンドルを閉じて、骨を切断、把持する。

【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[切れ味が落ちます。]
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 本製品は複雑な構造を有する製品のため血液などが隙間に付着することが予想されます洗浄の際には血液溶解剤又は蛋白質分解酵素剤の前処理を行い洗浄、滅菌を行って下さい。[通常の洗浄では、隙間部分に付着した血液・体組織等が除去しきれない恐れがあります。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリパキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4 分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>