

類別等：機械器具 (42) 医療用剥離子
一般医療機器 起子 11504000
販売名：イノメッド・エレベーター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因
となります]

【形状・構造及び原理等】

【材質】 ステンレススチール

1. APC・プロキシマル・フェモラル・エレベーター



2. プロキシマル・フェモラル・エレベーター



近位大腿骨を持ち上げるために使用する。

3. エクストラ レベージ フェモラル ネック エレベーター



4. アムスタッツ フェモラル ネック エレベーター




5. ペリオスティール・エレベーター



骨膜の剥離等に使用する

6. トロンヒル オフセット プロキシマル フェモラル エレベーター

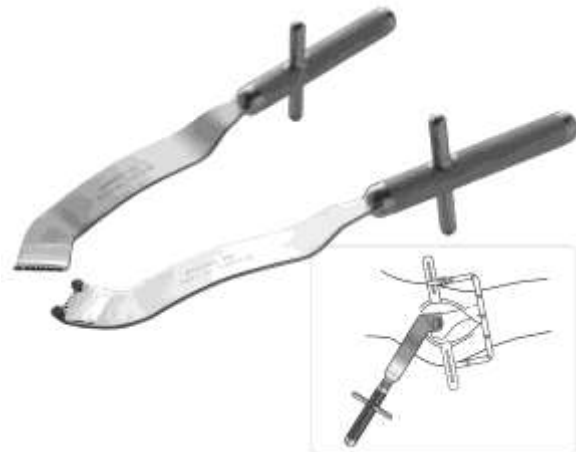

7. ミューラー・フェモラル・ネック・エレベーター



8. ドール フェモラルネック エレベーター (ワイド / ナロー)



9. ミューラー・スタイロ・フェモラル・ヘッド・ディスロケーション・レバー



10. ホースマン アンテリア THA フェモラルエレベーター



11. ホープ ダイレクト アンテリア フェモラル レトラクター



12. ヒップ レトラクター ウェストパッド付



【使用目的又は効果】

組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具の持ち上げ、配置又は梃子による押し上げに用いる。

【使用方法等】

使用方法に関しては、【形状・構造等】に記載されている図を参照下さい。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4分間以上（推奨）
 その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>