

類別等：機械器具（58）整形用機械器具  
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

## 販売名：イノメッド・オステオ・インスツルメント

### 【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

### 【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール製

ユニバーサル ボーン グラフティング / インパ クティング フォーセップ



### 【使用目的又は効果】

人工股関節術等の整形外科手術に際し骨移植の際に使用する

### 【使用方法等】



移植骨片を本製品で挟んで、目的部位に運びます。  
先端を閉じると、打ち込みに適した形状になり、上図のように、マレット等で骨片を打ち込むことができます。

### 【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[切れ味が落ちます。]
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]
- 本製品は、打ち込み時に大きな衝撃を受けることが、予想されます。特に過剰な衝撃は、本製品の破損又は変形につながりますので注意して下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

### 【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
  - 滅菌方法及び滅菌条件  
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌  
132°C 4分間以上（推奨）その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1  
電話番号 03 (5644) 8711(代)  
URL <http://tact-medical.co.jp>  
製造国名：米国  
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)  
URL <http://www.innomed.net>