

類別等: 機械器具 (30) 結紮器及び縫合器
一般医療機器 持針器 12726010

販売名: フィーリング・HCR・ニードルホルダー

【禁忌・禁止】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール/セラミックコーティング(又はコーティング無)

先端部位: TC(タングステンカーバイド)

縫合針を把持部位ではさむことで、縫合針を把持する。



【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を把持する際に使用する。

【操作方法又は使用方法等】

本製品は、縫合針を把持部位ではさみ、ロックして目的部位に縫合針を運び組織を縫う。

【使用上の注意】

- 使用中は丁寧に扱い、投げたり落としたりしないで下さい。製品同士がぶつかったり、重なり合ったりしないよう注意し、先端部は上を向くように置いてください。
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。
- 洗浄剤は必ず医療用の洗浄剤をご使用ください。又、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用し洗浄、滅菌を行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]
- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 異なる金属とは一緒に洗浄しないでください。[電解沈着の原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 洗浄及び保管前に、接合部の緩みがないか確認してください。
- 洗浄後、速やかに乾燥させ保管すること。[サビやシミの防止のため]
- 保管前には、医療用防錆潤滑剤を使用してください。潤滑剤は洗浄により除去されますので、保存前には毎回潤滑剤を使用してください。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。

●滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌

134°C 5分間以上(推奨)

乾燥時間: 10分間

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法(エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌)に準じて下さい。

また、脊椎等の手術に使用する鋼製製品に関しては、クロイツフェルト・ヤコブ病の疑いがある患者の手術を行った際には、以下の消毒法に従い滅菌して下さい。

1. 3%SDS(トデシル硫酸ナトリウム)、5分間、100°C
2. 高圧蒸気滅菌: 132°Cで1時間オートクレーブにて高圧滅菌する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03(5644)8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名: 独国

製造業者名: FEHLING INSTRUMENTS GMBH(フィーリング社)

住所: Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein, Germany及び

製造業者名: Gebrüder Zepf Medizintechnik

住所: Lehrstrasse 11, 78589 Durbheim, Tuttlingen, Germany