

類別等：機械器具 (36) 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット 35079001  
販売名：フィーリング・組織鑷子

**【警告】**

先端は非常にデリケートな部分ですので、落としたりすると、変形する恐れがあります。

**【禁忌・禁止】**

加工・改造は行わないこと。[折損の原因となります]

**【形状・構造及び原理等】**

ステンレススチール/セラミックコーティング (又はコーティング無)

先端部位：TC (タングステン・カーバイト)

二つの先端部にて、組織を挟むことで把持、圧迫又は支持する。

① ドベーキー 無外傷性鑷子



② アドソン鑷子



③ ポッツ スミス鑷子



④ ジェラルド/クッシング/セムケン鑷子



⑤ 外科鑷子 (スタンダード・デリケート)



**【使用目的又は効果】**

外科手術時において組織を把持、圧迫又は支持するために用いられる。

**【使用方法等】**

本製品の先端部にて、目的組織を挟む。

### 【使用上の注意】

- 使用中は丁寧に扱い、投げたり落としたりしないで下さい。製品同士がぶつかったり、重なり合ったりしないよう注意し、先端部は上を向くように置いてください。[精密機器ですので、衝撃によっては変形を生じます。]
- 血液等汚れのついた製品は使用后速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。
- 洗浄剤は必ず医療用の洗浄剤をご使用ください。又、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用し洗浄、滅菌を行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]
- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 異なる金属とは一緒に洗浄しないでください。[電解沈着の原因となります。]

### 【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

### 【保守・点検に係る事項】

- 洗浄及び保管前に、接合部の緩み及び破損がないか確認してください。緩み及び破損が確認される製品に関しては使用を中止して下さい。
- 洗浄後、速やかに乾燥させ保管すること。[サビやシミの防止のため]
- 保管前には、医療用防錆潤滑剤を使用してください。潤滑剤は洗浄により除去されますので、保存前には毎回潤滑剤を使用してください。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
  - 滅菌方法及び滅菌条件  
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌  
134℃ 5分間以上(推奨)  
乾燥時間：10分間その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：独国

製造業者名：FEHLING INSTRUMENTS GMBH (フィーリング社)

住所：Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein, Germany

及び

製造業者名：Gebrüder Zepf Medizintechnik

住所：Lehrstrasse 11, 78589 Durbheim, Tuttlingen, Germany