

類別等：機械器具(07)内臓機能代用器
一般医療機器 人工心臓弁用サイザー 17703010
販売名：フィーリング・心臓弁サイザー


【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレス・スチール/ニッケル・チタニウム合金(ニチノール)
先端部位にて患者の心臓弁を測定する。

スーパープラスチックバルブゲージ

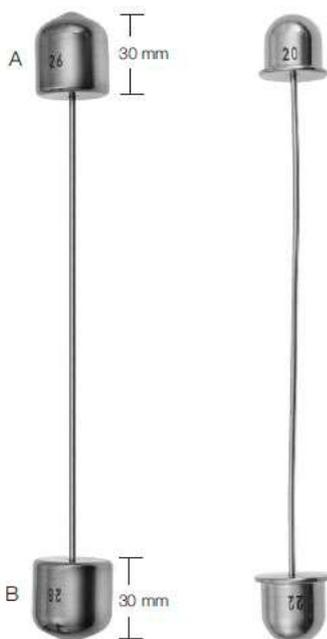

長さ：220mm 又は 300mm

ポリウレタンスーパープラスチック3Dバルブゲージ



長さ：190mm

【使用目的又は効果】

心臓弁再建術又は心臓弁置換術にて、心臓弁の適切なサイズを測定するために使用する。

【使用方法等】

先端部位を心臓弁開口部に挿入又はあてがい測定する。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌
134°C 5分間以上(推奨)
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法(エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌)に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03(5644)8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：独国

製造業者名 : FEHLING INSTRUMENTS GMBH (フィーリング社)
住所 : Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein , Germany