

類別等：機械器具（47）注射針及び穿刺針
一般医療機器 再使用可能な先丸針 37463000
販売名：フィーリング・カニューラ

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

134℃ 5 分間以上（推奨）

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03（5644）8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：独国

製造業者名：FEHLING INSTRUMENTS GMBH（フィーリング社）

住所：Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein, Germany

【形状・構造及び原理等】

ステンレス・スチール合金/ニッケル・チタニウム合金（ニチノール）

先端部位にて繊細な組織を保護する。内部中空部位で薬液を通す。

ヘパリン カニューラ



先端：径φ1.2～5.0mm

長さ：48～160mm

【使用目的又は効果】

目的部位に薬液を注入する際に使用する。

【使用方法等】

本製品をシリンジの先端に装着して、薬液等を注入する。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌