


類別等：機械器具（30）結紮器及び縫合器
一般医療機器 縫合糸パサ 37839001

販売名：フィーリング・スーチャー・フック

【形状・構造及び原理等】


ステンレス・スチール合金又はニッケル・チタニウム合金
先端に組織を貫通させ、縫合糸を導く。

スーチャー・フック

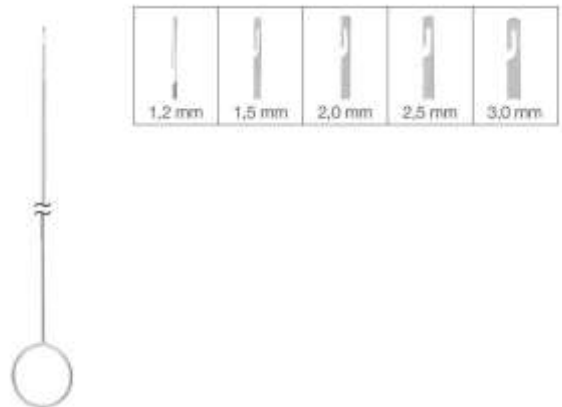

長さ：120～280mm
先端の形状は、左上のとおり

トロカール スリーブ

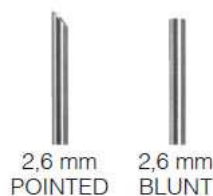

TROCAR SLEEVE

【使用目的又は効果】

縫合糸及び縫合針を組織に貫通させるために用いる。

【使用方法等】

先端の縫合糸を引っ掛け、引き抜くことで縫合糸を貫通させる。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【取扱い上の注意】

特になし

【保守・点検に係る事項】

- 本製品は未滅菌のため、使用毎に滅菌をして使用して下さい。
- 本製品の洗浄に関しては、弱アルカリ性又は中性の洗剤を用いた自動洗浄器を使用できます。ただし、すすぎの際は脱イオン水を用いてください。[塩素などのイオン残留を防ぐため]
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌

134℃ 5 分間以上（推奨）

乾燥時間：10 分間

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：独国

製造業者名：FEHLING INSTRUMENTS GMBH（フィーリング社）

住所：Hanauer Landstr. 7, D-63791 Karlstein, Germany