

類別等：機械器具 (58) 整形用機械器具  
一般医療機器 外科手術用骨クランプ 34949000  
販売名：イノメッド・ティビア・クランプ

**【警告】**

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

**【形状・構造及び原理等】**

ステンレススチール  
本製品の先端で骨を把持する。

1. フェモラルヘッド・リムーバル・クランプ



大腿骨頭を把持する際に使用する。

2. ユニバーサルキャリブレイテッド・ティビア/パテラ・クランプ



3. フラッチャーキャリブレイテッド・ティビア/パテラ・クランプ



4. アントリユース・モティファイト・ティビアル・ウェッジ・クランプ



5. シドゥ・ティビアル・ウェッジ・リムーバー



切除した骨片を把持する際に使用する。

**【使用目的又は効果】**

膝手術の際の頸骨の切断部や膝蓋骨を締め付けて把持し、除去や反転するために用いる手術器具である。

**【使用方法等】**

本製品の先端にて頸骨等を把持する。

**【使用上の注意】**

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

**【保管方法及び有効期間等】**

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

**【保守・点検に係る事項】**

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
  - 滅菌方法及び滅菌条件  
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌  
132°C 4分間以上(推奨)  
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法(エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌)に準じて下さい。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

タクト医療株式会社  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1  
電話番号 03 (5644) 8711(代)  
URL <http://tact-medical.co.jp>  
製造国名：米国  
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)  
URL <http://www.innomed.net>