

類別等：機械器具（43）医療用つち  
一般医療機器 つち 11947010

販売名：イノメッド・マレット

#### 【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

#### 【形状・構造及び原理等】

ヘッド部位：ステンレス・スチール又はアセテート・コポリマー（デルリン樹脂）

シャフト部位：ステンレス・スチール

ハンドル部位：アセテート・コポリマー（デルリン樹脂）

先端のヘッド部位を手術器械にぶつけ衝撃を加えることで、手術器械に力を加える。

#### 1. ソフト・インパクト・マレット



#### 2. ジョイス マレット



#### 3. オーソ・マレット



#### 【使用目的又は効果】

整形外科等の手術時に、手術器械に力を加えるために使用する器具

#### 【使用方法等】

先端のヘッド部位を手術器械にぶつけ衝撃を与える。

#### 【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

#### 【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 中空部分の存在するものによっては、ブラシ等で入念に洗浄し血液等の異物が存在しないことを確認して下さい。
- 強アルカリ・強酸性洗剤は、本製品を腐食する場合がありますので、洗浄の際は医療用中性洗剤をご使用下さい。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
  - 滅菌方法及び滅菌条件
    - \* ステンレス製品  
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌  
132°C 4分間以上（推奨）
    - \* デルリン樹脂を含む場合  
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌  
132°C 6分間以上（推奨）その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1  
電話番号 03 (5644) 8711(代)  
URL <http://tact-medical.co.jp>  
製造国名：米国  
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)  
URL <http://www.innomed.net>