

類別等：機械器具 (35) 医療用はさみ
一般医療機器 はさみ 35325001
販売名：イノメッド・シザーズ

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

① カプセル・シザーズ



② アングル・シザーズ



③ ディセクティング・シザー



【組成・材質】

本体：ステンレス・スチール
先端コーティング：タングステン・カーバイド付・無

【原理】

先端の2枚の刃を閉じることによって組織等を切断する。

【使用目的又は効果】

外科手術時に組織を切除する際に使用する。

【使用方法等】

使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。

- 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132°C 4分間以上（推奨）

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【使用方法】

本製品の先端部位に、切断する組織を挟み。先端の2枚の刃を閉じて組織を切断する。

【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び使用期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄して下さい。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)
URL <http://www.innomed.net>