

類別等：機械器具 (38) 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000

販売名：イノメッド・ショルダー・レトラクター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール又はアルミニウム合金製品の先端で組織を拡げる

1. ヒューメル・ヘッド・レトラクター



2. カフセル・レトラクター



3. デルトイド・レトラクター



4. ホステリアー・グレンノイド・ネック・レトラクター



5. アンテリア・グレンノイド・ネック・レトラクター



6. ゴールド・スチン・グレンノイド・ネック・レトラクター



7. モデファイター・フック・タイプ・エレベーター




8. アグラーワル・ティロン・レトラクター



上腕骨後方及びグレンノイドの関節面の術野を広げる際に使用する。

9. プロネ・デルトイド・レトラクター

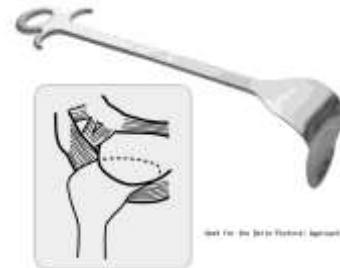

スパ・リンク・ブラウン・デルトイド/リチャードソン・レトラクター



10. キルシェンバウム・アクロミオプラスティール・レトラクター



肩峰部位下方後方のふちに先端をあて、上腕骨骨頭を押し下げ展開する。

11. シン・グレンノイド・レトラクター



グレンノイドの前方又は後方エッジ部位に先端をあて、前方

又は後方側に創を展開する。

12. モデファイド・ダラッチタイプ・エレベーター



上腕骨頭を持ち上げて、深層組織部位の術野を広げる際に使用する。

13. スパイクト・ダラッチタイプ・エレベーター



グレンオイドの前方エッジ部位に先端をあて、前方側に創を展開する。

14. ホステリア・グレンオイド・エレベーター



グレンオイドの後方エッジ部位に先端をあて、後方側に創を展開する。

15. バイセップ・エレベーター



16. グレイド レトラクター



17. レビアンテリア グレンオイド レトラクター



18. バーケット グレンオイド レトラクター



19. グレスファイア コンポネント レトラクター



20. マクファーランド V レトラクター



【使用目的又は効果】

肩関節の手術時に軟部組織等を上げ又は保護し術野を確保するために使用する。

【使用方法等】

先端部位を骨にあて、鉤の裏側に周囲の軟部組織を上げます。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
134℃ 4分間以上 (推奨)
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>