

類別等：機械器具 (38) 医療用鉤  
一般医療機器 鉤 35105000  
類別等：機械器具 (58) 整形用機械器具  
一般医療機器 整形外科用やすり 36167001

販売名：イノメッド・アンガーヒップ・レトラクター

**【警告】**

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因  
となります]

**【形状・構造及び原理等】**

ステンレス・スチール

ハンドル部位：デルリン

先端の鉤の部位で組織を開創する。又は先端のやすりで髓腔を拡げる

アンガ - ワイド ホーマン



アンガ - ナロー ホーマン



アンガ - プラント ナロー コブラ



アンガ - オフセット ナロー ホーマン



アンガ - ソフトティッシュ レトラクター



アンガ - フェモラルネック エレベーター



アンガ - キャナル ファインダー ラスプ



**【使用目的又は効果】**

股関節の手術時に大腿骨髓腔を広げ又は軟部組織等を拡げ又は保護し術野を確保するために使用する。

**【操作方法又は使用方法等】**

先端部位を骨にあて、鉤の裏側にて周辺の軟部組織を拡げます。

#### 臼蓋側展開時



#### 大腿骨側展開時



アングー キャナル ファインダー ラスプ® は、大腿骨髄腔を広げる際に使用します。

#### 【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

#### 【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
  - 滅菌方法及び滅菌条件  
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌  
134℃ 4分間以上（推奨）  
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社  
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1  
電話番号 03 (5644) 8711(代)  
URL <http://tact-medical.co.jp>  
製造国名：米国  
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)  
URL <http://www.innomed.net>