

類別等：機械器具 (38) 医療用鉤
一般医療機器 鉤 35105000
類別等：機械器具 (42) 医療用剥離子
一般医療機器 起子 11504000

販売名：イノメッド・ダス・センヒップ・レトラクター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレス・スチール
先端の鉤の部位で組織を開創する。

6221: ダス・セン ホステリア フェモラル ネック エレベーター#1



6222: ダス・セン アンテリア フェモラル ネック エレベーター#2



6223: ダス・セン アンテリア アセタブラー レトラクター#3



6224: ダス・セン ホステリア アセタブラー レトラクター#4



6227: ダス・セン フェモラル カルカー レトラクター#6



6225: ダス・セン グレタートロカンター レトラクター#7



6226-EH: ダス・セン エレベーター フック#5

6226-TA: ダス・セン テーブルアセンブリー



【使用目的又は効果】

股関節の手術時に軟部組織等を上げ又は保護し術野を確保するために使用する。

【使用方法等】 大腿骨頭展開時



- ①6221: タスセン ホステリア フェモラル ネック エレベーター#1
大腿骨頭部上方の関節包外に位置させる。
②6222: タスセン アンテリア フェモラル ネック エレベーター#2
大腿骨頭部下方の関節包外に位置させる。
③6223: タスセン アンテリア アセプテラー レトラクター#3
臼蓋の上方縁の外側に位置させる。大殿筋等に注意する。

臼蓋骨展開時（髓腔リーミング時）



- ②6222: タスセン アンテリア フェモラル ネック エレベーター#2
臼蓋の前方内側の外側に位置させる。
③6223: タスセン アンテリア アセプテラー レトラクター#3
臼蓋の後方の背後に位置させる。
④6224: タスセン ホステリア アセプテラー レトラクター#4
臼蓋の前方上方に位置させる。

大腿骨ラスピング及び大腿骨ステム挿入時



- ⑥6227: タスセン フェモラル カルカー レトラクター#6
大腿骨頭部の内側に大腿骨を押しように位置させる。
⑦6225: タスセン グレートトキセンター レトラクター#7
大転子の後方側に位置させる。
⑤6226-EH: タスセン エレベーター フック#5
大腿骨頭部にフックを掛け、大腿骨を持ち上げる。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分

に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌
134℃ 4分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>