

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 外科手術用骨クランプ 34949000

販売名：イノメッド・スモールボーン・クランプ

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因
となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレススチール/カーボン樹脂
本製品の先端で骨を把持する。

1. レトラー パーキュテニアス ピン クランプ



2. レトラー リスト ボーン クランプ



3. チャン・ピン・クランプ



4. オブライアン ボーン クランプ



5. オブライアン ボーン クランプ / オールセプト オブライアン ボーン クランプ



6. レビン スモール ボーン クランプ



7. メディアル マレオラー/スモール ボーン フラグメント クランプ



8. バルコ ボーン ホールディング クランプ




9. スモール・ボーン・ホールディング・フォーセツプ



10. スラビット ファランジール フォーセツプス



11. レスニック アリス ボーンクランプ（コーティング無）

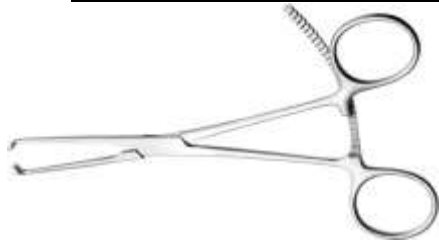

12. ダンカン メタサル クランプ



13. デザイジヨンス フラクチャー リダクション クランプ



【使用目的又は効果】

手術時に骨を把持するか骨折した骨の近位部又は遠位部を近接させるために用いる。

【使用方法等】

①レドラー パーキュテインス ピン クランプ

②レドラー リスト ボーン クランプ

③チャン・ピン・クランプ

上記3点（ピンのがいつを有するタイプ）



ピンを挿入する骨をはさみ、一方のがいつにピンを挿入する。（上図）

④オブライン ボーン クランプ

⑤オブライン ボーン クランプ ドリルがいつ付

上記2点（ドリルがいつを有するタイプ）



ドリルを挿入する骨をはさみ、一方のがいつにドリルを挿入する。（上図）

その他の製品：把持する骨を、先端ではさむ。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 長期使用により、特に製品のヒンジ及び溶接部分、かしめ加工部分等は、滅菌及び洗浄によりシミ又は腐食が生じ破損が生じやすい部位です。これらの部位の異常が生じた場合には、修理等の適切な処置をして下さい。[材質の劣化による]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌
134℃ 4 分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>