

販売名：イノメッド・オーソルセント・レトラクター

【警告】

- 加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]
- 本製品は金属製のレトラクターと同様の強度を有していません。[設計上 60%程度の強度：自社認証より]

【形状・構造及び原理等】

カーボンファイバー又はステンレス・スチール
先端の鉤の部位で組織を拡げる。

オーソルセント™ ホーマン レトラクター



ブラウン デルイト® オーソルセント レトラクター



オーソルセント ミニ ホーマン レトラクター



【使用目的又は効果】

手術時に軟部組織等を拡げ又は保護し術野を確保するために使用する。

【使用方法等】

先端の鉤の部位で、任意の組織を開創する。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本製品は、ソーブレード又は電気メスなどの接触による製品のキズは金属と同程度の耐久性を有してません。
- 洗浄に関しては、中性洗剤 (pH9.0 以下) を使用して下さい。酵素洗剤及び殺菌剤の使用に関しては、洗浄剤メーカーの指示に従って下さい。
- 本製品は、油剤及び油分を含む浸透剤を使用しないで下さい。[カーボンファイバーの成分が溶け出す可能性があります。強度が低下します、溶出成分による人体への影響は現在のところありません。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄して下さい。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、以下の条件にて滅菌して下さい。(カーボンファイバー製)
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
133~134℃ 4分間 乾燥時間：20分
その他の滅菌方法・条件に関しては、お勤めいたしておりません。また、カーボンファイバー製品は、外装コティングが他の器具の接触等により削れる可能性があります。滅菌・洗浄の際は、個別に行って下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711(代)
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)
URL <http://www.innomed.net>