

類別等：機械器具（46）医療用絞断器
一般医療機器 ワイヤカッター 32885000
（その他の一般的名称：ワイヤクリンパ 32879000）
販売名：イノメッド・ワイヤーカッター

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[破損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

（１） ワイヤ・カッター・ベンダー



（２） スモール ワイヤ ベンダー プライヤー



【原材料】

本体：ステンレス・スチール

【原理】

本製品は、中央付近にある転心が支点となって、ハンドルを閉じる手の握力が増幅されて先端有効部に伝達される。先端有効部の、鋭利で互いに合致する２枚の刃の間に介在するピンやワイヤーなどが切断される。

【使用目的又は効果】

K-ワイヤー、ピンを切断又は曲げる際に使用する。

【使用方法等】


○操作方法

K-ワイヤー等を曲げる場合



図のように、先端のスロット部位にワイヤーを通し、ハンドルを閉じることではほぼ 90° に曲がります。

- スモール ワイヤ ベンダー プライヤーの場合以下

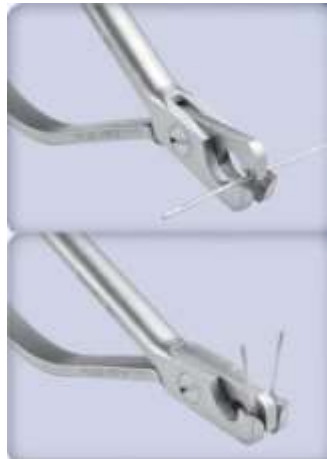

K-ワイヤー等を切る場合



図のように、ハンドルの穴にワイヤーを通し、ハンドルを閉じます。

【使用上の注意】

- 使用に際しては、規格以上の径のワイヤー及びピンを切断しないで下さい。[破損の原因になります。]
- ワイヤー及びピンを切断する際は、切断片が飛ぶ場合がありますので十分注意して下さい。[切断片によりケガの恐れがあります。]
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4 分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>