

類別等：機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001
販売名：イノメッド・骨タンパ

【警告】

加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因
となります]

【形状・構造及び原理等】

ステンレス鋼合金/デルリン樹脂
先端部位にて骨等に衝撃を与える。

ボーングラフトインパクト



オーソインパクト



ボーンタンパー



バーストアップレイト



マレアル ボーン グラフト インパクト



モジュラーインパクトセット



(先端形状の拡大図：上)

【使用目的又は効果】

脊椎固定術等の整形外科手術にて、骨を圧迫し固定する際に使用する

【使用方法等】

【使用方法】

直接又はハンマー等で叩いて、先端部位で骨を押さえつけて圧迫する。

【使用上の注意】

- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分

に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリパキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4 分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法に準じて下さい。
- また、脊椎等の手術に使用する鋼製製品に関しては、クロイツフェルト・ヤコブ病の疑いがある患者の手術を行った際には、最新の国内規制及びガイドライン等に従い滅菌して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>