


類別等：機械器具 (42) 医療用剥離子
一般医療機器 起子 11504000

販売名：イノメッド・フェモラルヘッド・レトラクター

【形状・構造及び原理等】

ステンレス・スチール

先端の鈎の部位で骨頭を押し上げる。

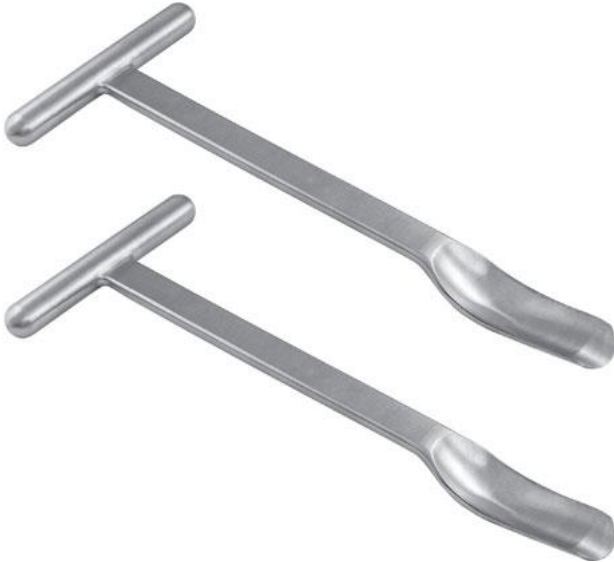

先端は、鈍又は鋭の形状がある。

【使用目的又は効果】

股関節の手術時に股関節を脱臼させるために使用する。

【使用方法等】

臼蓋と骨頭の間に、本製品の先端を挿入して骨頭を押し上げます。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気ブリバキューム高圧蒸気滅菌
134℃ 4 分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711(代)

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)

URL <http://www.innomed.net>