


類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

販売名：イノメッド・ネイル・スクリューガイド

【形状・構造及び原理等】

1. モディファイト® エクステンデッド® ドリル スリーブ

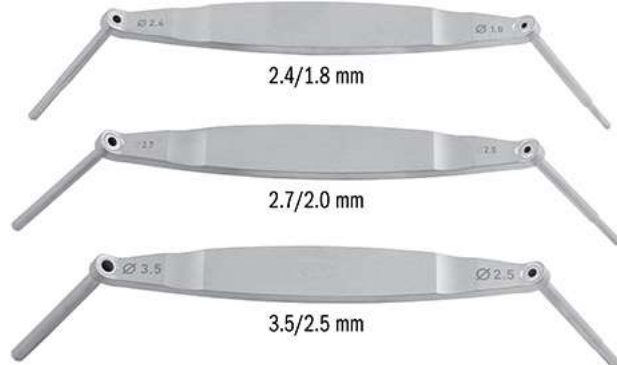

Guide Tube Length: 2.25" (5.7 cm)

2. スタントン ネイル/スクリュー ドリルガイド アッセンブリー



トロカー直径：φ5.0 mm

3. デプスゲージ



目盛：0-48 mm

4. メンガート デプスゲージ



目盛：0-50 mm

【組成・材質】

ステンレススチール

【原理】

スリーブ又はガイドに挿入したドリルにより骨孔を作成する。

【使用目的又は効果】

骨接合術等の整形外科手術にて使用する

【使用方法等】

● 使用方法

本製品に適当なドリルを通し、先端を挿入する骨に誘導する。



骨孔を作成した後、デプスゲージを挿入して、深さを測る。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 本製品は中空構造を有する製品が存在するため血液などが隙間に付着することが予想されます洗浄の際には血液溶解剤又は蛋白質分解酵素剤の前処理を行い洗浄、滅菌を行ってください。[通常の洗浄では、隙間部分に付着した血液・体組織等が除去しきれない恐れがあります。]
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキシサイドガスにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【包装】

包装単位：1 個又は 1 セット

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)

URL <http://www.innomed.net>