

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

販売名：イノメッド・フィンガー・ガイド

【形状・構造及び原理等】

【形状】

サム サージカル フィンガー ガイド



アラフ フラクチャー リダクション シンブル



【材質】ステンレススチール合金

【原理】指でガイドを保持する。

【使用目的又は効果】

骨手術の際に金属ワイヤーを通すために用いる手術器械である。

【使用方法等】

本製品を指に通す又は抑えて、サイドにあるガイドにワイヤーを通します。



【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]

- 使用に先立ち、オートクレーブにより滅菌して下さい。

● 滅菌方法及び滅菌条件

真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌

132℃ 4分間以上（推奨）

その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都日本橋茅場町 2-16-1

電話番号 03 (5644) 8711

URL <http://tact-medical.co.jp>

製造国名：米国

製造業者名：Innomed, Inc. (イノメッド社)

URL <http://www.innomed.net>