

類別等：機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001

販売名：イノメッド・メイヤー・ドリルガイド

【形状・構造及び原理等】

【形状】

メイヤー ラタルジェットドリルガイド&フォセップ



【材質】ステンレススチール合金

【原理】ドリルガイドにて適切な位置にドリルホールを作成する。

【使用目的又は効果】

ラタルジェ法（Latarjet）にて烏口突起移行術の際に用いる手術器械である。

【使用方法等】



- ① 採取した烏口突起の移植骨をドリルガイドとフォセップを用いて把持します。
- ② 烏口突起の移植骨にφ3.5mmのドリルで穴を2個開けます。
- ③ 関節窩頸部の後方にドリルガイドを当てる。
- ④ φ2.5mmのドリルで穴を開け、K-ワイヤーで仮固定し平行に再度ドリルで穴を開けます。
- ⑤ 烏口突起の移植骨を、φ3.5mm又はφ4.5mmの骨スクリューで固定します。

【使用上の注意】

- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- 使用に先立ち、オートクレーブにより滅菌して下さい。
 - 滅菌方法及び滅菌条件
真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
132℃ 4分間以上（推奨）
その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキシド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

タクト医療株式会社
〒103-0025 東京都日本橋茅場町 2-16-1
電話番号 03 (5644) 8711
URL <http://tact-medical.co.jp>
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc. (イノメット社)
URL <http://www.innomed.net>