

類別：医 04 整形用品

一般医療機器 一般的名称：医療用不織布（JMDN コード：34655000）

タマガワ止血パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用しないこと〔ディスポーザブル製品のため〕
2. アルギン酸カルシウムなど本製品の成分に対してアレルギーのある方は使用しないこと
3. 傷に化膿や熱、腫れがある場合は使用しないこと
4. 下記の使用目的以外に使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
 - ・アルギン酸カルシウムからなる不織布（白色から淡黄褐色）は、創部を被覆して保護するとともに、血液、浸出液などの体液を吸収する。



・サイズ：4cm x 5cm

本品は、滅菌済みであり単回使用である。

【使用目的又は効果】

軽度の切り傷、擦り傷、かき傷、あかざれ、さかむけ、靴擦れ等の創傷における血液や浸出液を吸収し保護することを目的とする。

【使用方法】

傷口を十分に洗浄し、本品を包装袋から取り出して押し当てる。必要があればテープ等で固定する。

【使用上の注意】

《基本的注意》

1. 異物を完全に取り除いてから使用すること。
2. 感染の疑いがある傷への使用は止血後、医師へ相談することをお勧めします。
3. 使用前に本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がないことを確認すること。
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。
5. 数日間貼り続けた場合、パッド自体が溶け出すことがあります但し害はありません。

《その他の注意》

使用済みの製品は他者が触れることがないよう袋などに入れて廃棄してください。

【保管方法及び有効期間】

《保管方法》

1. 小児の手が届かない所に保管してください。
2. 温度や湿度が極端に高くなる場所や直射日光の当たる場所を避けて保管してください。
3. 1 枚ずつ滅菌されていますので、個包装が破れないように保管してください。

《有効期間》

使用期限は外装に記載されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

＜製造販売業者＞玉川衛材株式会社 東京都千代田区富士見 1-8-19

お客様相談窓口 03-4334-8857