

*機械器具 36 医療用ピンセット
*一般医療機器 *ピンセット *JMDNコード：35079001

アシコ 鑷子

(アシコ インジェクター ローディング鑷子)

【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 本製品は、「アルコン® アクリソフ® シングルピース」以外の眼内レンズには使用しないこと。
[[相互作用]の項参照]
2. 本製品は、「IOL デリバリーシステム」以外と併用しないこと。
[[相互作用]の項参照]

*【保守・点検に係る事項】

下表は、高圧蒸気滅菌サイクルの標準的な時間と温度である。バイオバーデンは滅菌装置等によって異なるため、滅菌条件のパラメーター等については各施設で検討すること。

滅菌方法	滅菌器の種類	包装状態	滅菌温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	加圧排気	包装	132℃	34分
フラッシュ滅菌	加圧排気	未包装	132℃	10分
高圧蒸気滅菌	真空強制排気	包装	132℃	4分
フラッシュ滅菌	真空強制排気	未包装	132℃	4分

*【形状・構造及び原理等】

本製品は、眼内レンズをIOLデリバリーシステムに装填するためのピンセットである。
製品コード：AE-4253N

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

**【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）

【材質】

ステンレス鋼

【形状】



【使用目的又は効果】

眼内レンズをつまみ、又は把持するために用いる器具である。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 初回使用直前ならびに使用後は十分に洗浄すること。
2. 本製品は未滅菌品であるので、使用前に必ず滅菌すること。
[[保守・点検に係る事項]の項参照]
3. 本製品を使用する前に損傷がないこと、及び正常に作動することを確認すること。
4. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

<相互作用>（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

<併用禁忌>（併用しないこと）

1. 本製品は、「アルコン アクリソフ シングルピース」以外の眼内レンズには使用しないこと。
2. 本製品は、「IOL デリバリーシステム」以外と併用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>


貯蔵・保管にあたっては、洗浄後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。

<有効期間>



再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【アシコ インジェクター ローディング鑷子の取扱い方法】
 眼内レンズの容器からの取り出し及びIOLデリバリーシステム（カートリッジ）への装填

- *1. 眼内レンズを装填する直前に、IOLデリバリーシステムのカートリッジ内部にアルコン社推奨の粘弾性物質を十分に充填する。推奨される粘弾性物質については、日本アルコン株式会社まで問い合わせること。
 眼内レンズの容器の平らな部分にも粘弾性物質を1滴落とし、さらに、光学部上面中央にも粘弾性物質を数滴落とす。
 鑷子を容器に対して直角に持ち、片方の支持部を慎重に挟む。眼内レンズを容器から取り出して、落とされた粘弾性物質の上に置く。

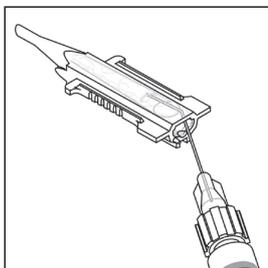


2. 鑷子を開いて、眼内レンズの容器から眼内レンズの支持部を挟んで取り出す。
 薄い方の鑷子先端を上に向けて鑷子を水平に持ち、6-12時の方向に、光学部径の1/3~1/2程度把持する。
 光学部がカートリッジ内に完全に収まるまで眼内レンズを挿入し、カートリッジ上面の眼内レンズのイラストに合わせて眼内レンズの向きを定める。

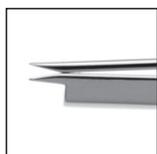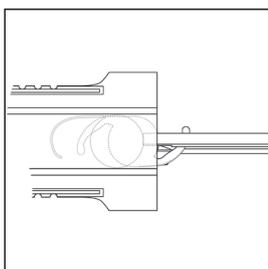


注意：鑷子先端は閉じた状態で、図のように溝を形成し、眼内レンズを眼内に挿入する際に使用する。眼内レンズを容器から取り出す際には、先端部分を避けて支持部を挟むこと。


3. 鑷子の薄い方の先端で眼内レンズをカートリッジの底面に慎重に押し付ける。

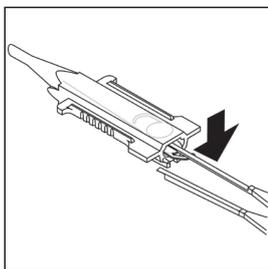


4. 以降の作業は、鑷子を閉じて使用する。

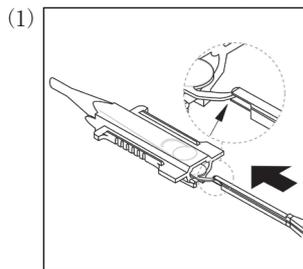

閉じた鑷子先端部の溝で、後方の支持部を捕える。

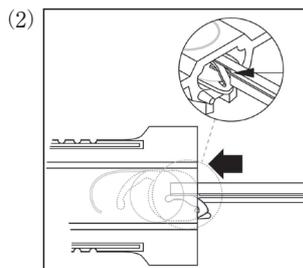

鑷子先端部の溝で捕えた後方の支持部を、光学部の上に乗せる。そのまま鑷子をカートリッジ内奥に向け挿入する。鑷子下側の段が光学部を押し、眼内レンズはカートリッジ内部に挿入される。

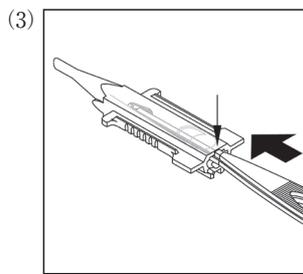

鑷子先端部の根元がカートリッジ開口部に達するまで、鑷子を押し進める。

- (4) 鑷子を閉じたまま引き出す。