

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDNコード：35079001

アシコ 鑷子

(アシコ プラート式 アクリソフ™ 鑷子)

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

本製品は、「アルコン™ アクリソフ™ シリーズ」以外の眼内レンズには使用しないこと。
[「相互作用」の項参照]

*【形状・構造及び原理等】

本製品は、先端が弧状となった眼内レンズを眼内に挿入するピンセットである。
製品コード：AE-4273N
材質：ステンレス鋼



【使用目的又は効果】

眼内レンズをつまみ、又は把持するために用いる器具である。

【使用方法等】

眼内レンズを折り曲げ、眼内に挿入する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 初回使用直前ならびに使用後は十分に洗浄すること。
2. 本製品は未滅菌品であるので、使用前に必ず滅菌すること。
[「保守・点検に係る事項」の項参照]
3. 本製品を使用する前に損傷がないこと、及び正常に作動することを確認すること。
4. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

＜相互作用＞（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

＜併用禁忌＞（併用しないこと）

本製品は、「アルコン アクリソフ シリーズ」以外の眼内レンズには使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管にあたっては、洗浄後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
2. 再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

下表は、高圧蒸気滅菌サイクルの標準的な時間と温度である。バイオバーデンは滅菌装置等によって異なるため、滅菌条件のパラメータ等については各施設で検討すること。

滅菌方法	滅菌器の種類	包装状態	滅菌温度	滅菌時間
高圧蒸気滅菌	加圧排気	包装	132℃	34分
フラッシュ滅菌	加圧排気	未包装	132℃	10分
高圧蒸気滅菌	真空強制排気	包装	132℃	4分
フラッシュ滅菌	真空強制排気	未包装	132℃	4分

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売者】

日本アルコン株式会社

**【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）