

モバイルスリットランプ MS1

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- (1) 撮影レンズ
- (2) スリット部
- (3) フィルター絞り切替ノブ
- (4) 散光板
- (5) ON/OFF 調光ボリューム
- (6) 額当て
- (7) 頬当て
- (8) 調整ネジ
- (9) ハンドストラップ
- (10) 制限板
- (11) 制限板調整ネジ
- (12) ゴムシート



2. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類:クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類:B 型装着部

3. 電氣的定格

電源電圧:DC3V

電源入力:単四電池x2

4. 寸法及び重量

寸法:(W)68mm (D)75mm (H)203mm

重量:230g

5. 作動・動作原理

スリット部より照明光を発し眼を観察する。必要に応じて、モバイルデバイスにより、静止画、動画の撮影ができる。

【使用目的又は効果】

人の眼球及びその附属器を細隙光により照明し、拡大像を診断のための情報として提供することを目的とする。

【使用方法等】

- (1)各部の取り付け、接続等が確実になされていることを確認する。
- (2)額当てと頬当てを適切な位置に合わせ固定する。
- (3)電源を ON にする。
- (4)照明の明るさを調整する。
- (5)必要に応じて静止画、動画の撮影を行う。
- (6)使用後は電源を OFF にする。

【使用上の注意】

1. 使用前の注意

- ・水のかからない場所で使用する。
- ・気圧、温度、湿度、通風、日光および塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所で使用する。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などがない安定した場所で使用する。

- ・強い磁力のある場所では使用しない。
 - ・濡れた手で乾電池を本機から抜き差ししない
 - ・各部の機能が正確かつ安全であることを確認する。
 - ・可燃性薬品、可燃性ガス、高濃度の酸素がある場所で使用しないこと。
2. 使用中の注意
 - ・機器全般に異常のないことを絶えず監視する。
 - ・機器の異常が発見された場合には、安全な状態で機器の動作を止めるなどの適切な措置を講じる。
 3. 使用後の注意
 - ・使用後は必ず調光ノブを回して電源を OFF にする。
 - ・使用後は必ずポリ袋に入れ、埃から保護する。
 - ・長期保管する場合には、本器に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する。
 4. その他の注意
 - ・故障した場合、当社が認定した修理技術者以外は修理を行わないこと。
 - ・故障した場合、機器が故障中であり使用できない事を表示すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

下記の条件で保管すること。

温度:-10～+55℃

相対湿度:10～95% (結露のないこと)

気圧:700～1060hPa

2. 耐用期間

適切な使用を行った場合に限り、8 年

[自己認証(当社データ)による]

3. 保管

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分等を含んだ空気により悪影響の生じる恐れのない場所に保管する。
- ・傾斜、振動、衝撃等がない安定した場所に保管する。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- ・汚れがひどいときには薄めた中性洗剤に浸して硬く絞った布で拭き、そのあと乾拭きする。
- ・レンズ、プリズムの清掃はレンズクリーニングペーパーに薄めたアルコールを少し染み込ませて軽く拭く。

2. 取扱い業者による保守点検

- ・使用者による保守点検事項と同等の内容
- ・装置の機能、性能に関する保守点検は取扱い業者では行わず製造販売業者へ連絡をする。

【製造販売業者および製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社タカギセイコー

製造業者：株式会社タカギセイコー