

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット 35079001

P S ピンセット L

【禁忌・禁止】

本品を折曲げたり、開いたりすると破壊の原因となるので絶対に行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社タイオックス

〒224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 8 番 3 3 号

TEL : 045-943-1951

【形状・構造及び原理等】

** (1) 形 状

ピンセットの両先端を閉じ、一定時間経過後、閉じた状態を解除した時元の状態に戻らなければならない。

** (2) 構 造

ピンセットの先端部は、使用時、両端の先端が一致し、且つ先端がずれてはならない。

外国製造業者

国 名 : オーストラリア

製造業者 : テクノ プラス株式会社

【使用目的又は効果】

皮膚や組織、異物等をつまみ、又は把持するために用いる。

【発売元の名称及び住所等】

日昭産業株式会社

〒105-8567

東京都港区虎ノ門 4-3-13

TEL : 03-5472-1676

【使用方法等】

使用の際、折曲げたり、開いたりすると破壊しますので行わないで下さい。

【使用上の注意】

(1) 本品を治療行為に使用する時は、滅菌を行ってから使用してください。

** (2) 本品を煮沸消毒、オートクレーブをすると形状変形となるので絶対に行わないこと。

(3) 高温の物を挟むことを避けて下さい。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

** (2) 有効期間

有効期間は特に定めない。

【取扱い上の注意】

** 本品を折曲げたり、開いたりすると破壊の原因となるので絶対に行わないこと。