

機械器具 29 電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナー 70654000

エレクトロ サージカル チップ クリーナー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 包装が破損している場合は使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。

〔形状〕

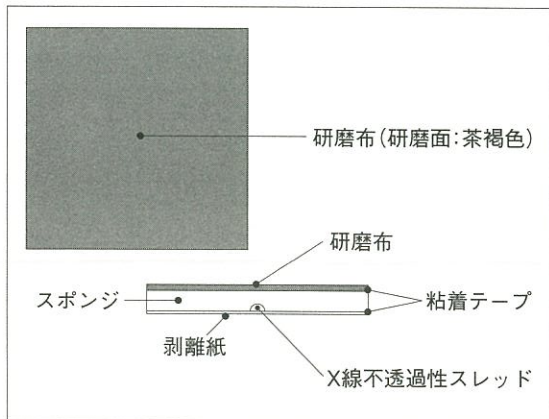

〔原理〕

研磨面に被研磨物を当て、被研磨物に付着したものを擦り落とす。

【使用目的、効能又は効果】

電気手術器を使用した際、アクティブ電極に付着した炭化物等を本品の研磨面に擦り付けて除去する。

【品目仕様】

炭化物を除去できる紙ヤスリ様の構造を有し、裏面の粘着テープでおい布或いは器械台に固定できる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 滅菌包装から取り出す。
2. 裏面の剥離紙を剥がし、おい布或いは器械台等に貼り付ける。
3. アクティブ電極の先端部に付着した、炭化物等を本品の研磨面に擦り付けて除去する。この際、過度な力で擦らないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 本品は単回使用の為、再使用しないこと。
2. 本品を使用目的以外の目的で使用しないこと。
3. 万一、包装に破損、汚れ、或いは封入されている製品に破損、異常を認めた場合は使用しないこと。
4. 本品使用後は、本品を安全な方法で処分すること。

【貯蔵、保管方法及び使用期限等】

〔貯蔵、保管方法〕

1. 水漏れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

【使用期限（滅菌有効期限）】

本品の包装に記載。使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

【包装】

36 枚／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

株式会社タイオックス

〒224-0032

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 8 番 33 号

サウスコア 302

TEL.045-943-1951

〔発売元〕

日昭産業株式会社

〒105-8567

東京都港区虎ノ門4-3-13

TEL.03-5472-1676

〔外国製造業者〕

パシフィックホスピタルサプライ社（台湾）

Pacific Hospital Supply Co., Ltd