

タニタ電子体温計 BT-47X

【禁忌・禁止】

- ・ お子様だけでは使わせないでください。
[測温部を嚥んで飲み込んだり、けがをするおそれがあります。]
- ・ 人の体温測定以外に使用しないでください。
[破損や故障、けがをするおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体、収納ケース

付属品：

取扱説明書(添付文書、保証書付)、

お試用電池(コイン形リチウム電池：CR2032)、EMC技術情報


※体温計の種類：予測式、一般用、測温部一体形、一部防浸形

※測温範囲：32.0℃～42.0℃

※使用環境：周囲温度10℃～40℃

相対湿度30%RH～85%RH

2. 形状・構造

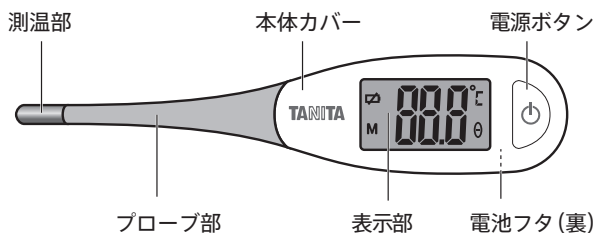

3. 体に接触する部分の原材料

測温部：ステンレス鋼

プローブ部：熱可塑性エラストマー

4. 原理

本品は、サーミスタの抵抗変化を利用して温度を検出する電子体温計である。測定開始から約20秒後に予測値を、それ以降は実測値の最高値をデジタルで表示する。

本品は、JIS T 1140:2014およびIEC60601-1-2:2014に適合しています。

5. 電氣的定格等

- ・ 定格電源入力：DC3V(CR2032×1個)
- ・ 電撃に対する保護の形式：内部電源機器
- ・ 電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部
- ・ 水の有害な浸入に対する保護の程度：IPX7

【使用目的又は効果】

測温部を部位に接触させて、腋下の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。

【使用方法等】

1. 電源ボタンを押して電源を入れます。
2. 音が鳴り、バックライトが点灯し、表示部に「88.8」とアイコンが全て表示されます。
3. 前回値が表示された後、「L」が表示されたことを確認して、腋下に挿入し、密着させます。
4. 検温中は予測マークと「°C」マークが点滅していることを確認します。
5. 約20秒後、予測検温を終了する音が鳴り、バックライトが点灯し、予測マークと「°C」マークが点滅します。
6. 予測体温を確認し、予測のみの場合は電源ボタンを押して終了します。
7. 実測検温に入る場合は、そのまま検温を続けます。
8. 検温開始から約3分すると音が鳴り、予測マークが消えて、実測値が表示され、再び「°C」マークが点滅します。
9. 検温開始から約10分後、バックライトと「°C」マークが点灯し、実測検温の終了を知らせる音が鳴ります。
10. 実測体温を確認し、電源ボタンを押して終了します。
11. 実測検温終了後、電源ボタンを押さない場合は実測検温終了から約3分後に自動的に電源が切れます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ・ 腋下以外で検温しないでください。
 - ・ 運動、入浴、食事の後約30分間は測定を避けてください。
 - ・ 予測検温では、正しい方法で測定を行わなかった場合や血行動態・体躯等によっては予測精度が保証されないおそれがあります。
 - ・ 測温部およびプローブ部は防浸ですが、それ以外(表示部など)は防浸ではありません。本体を水につけないでください。
 - ・ 無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 - ・ お子様の手が届かないところに保管してください。
 - ・ お子様が電池を飲み込まないように注意してください。
2. その他の注意事項
 - ・ 使用した後は測温部をティッシュなどで拭くか、アルコールを含ませた脱脂綿などで消毒してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品を保管するときは次の事項に注意してください。

- ・ 高温、多湿、直射日光の当たる場所等は避け、清潔な場所に負荷のかからない状態で保管してください。
- ・ 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などを避けた状態で保管してください。
- ・ 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

2. 耐用期間

標準的な使用期間の目安：5年(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本体の汚れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ・ 汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を含ませた布をかたく絞って拭き取った後、柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ 測温部を消毒する場合には、消毒用アルコールを含ませた脱脂綿などで軽く拭いてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 元 :株式会社タニタ秋田

住 所 :秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

電 話 番 号 :0187-66-2122

発 売 元 :株式会社タニタ

問い合わせ先 :お客様サービス相談室

住 所 :東京都板橋区前野町1-14-2

電 話 番 号 :0120-133821

:0570-783551(携帯電話用)

製 造 元 :Onbo Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (中国)
オンボエレクトロニク(シンセン)有限公司