

京大式舌圧子

【禁忌・禁止】

1. 本品に傷、バリ、欠け等が生じていたならば、使用しないこと。〔損傷を生じる〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：高橋 久美子
TEL 03-3812-7578

製造業者：TAIWAN NIKKO CO., LTD (台湾)


販売元：ミドリコーポレーション
東京都文京区湯島 2 - 10 - 4
TEL 03-3812-7578 FAX 03-3812-7902

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、ステンレス鋼製の板状器具で、舌を固定又は／及び移動させて口腔内の臓器及び組織の検査を容易にするために用いるものである。

2. 形状及び寸法

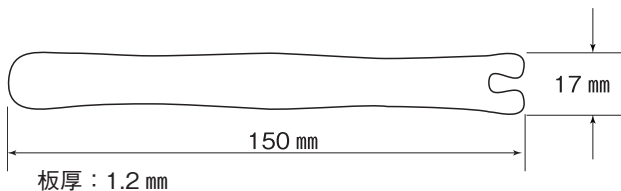

3. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる手術器具である。

【使用方法等】

1. 本品の長手片方を使用者が把持し、長手逆方を患者口腔内に挿入する。
2. 本品で患者の舌を検査の妨げにならない位置に移動させる。

【使用上の注意】

1. 本品は、未滅菌です。使用前に必ず洗浄・消毒をすること。
2. 本品を折り曲げたり、加工したりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光・高温多湿を避け、水濡れに注意して、常温・常湿の室内に保管すること。また、衛生的な保管場所に保管すること。

2. 使用後は、直ちに洗浄・消毒をし、腐食を防止するため必ず乾燥させること。