


歯科材料9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDNコード: 70901000

ホワイトアランダムポイント

【形状・構造及び原理等】

①形状・構造

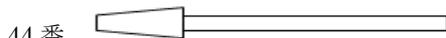

- 1) 砥石部: 人造研削剤をガラスで結合した軸付砥石
- 2) 軸部: ステンレス鋼

③包装

- 1) 同一形態 12本入り
- 2) 同一形態 120本入り

【使用目的又は効果】

陶材、歯冠用硬質レジン、金属等の補綴物の研削、研磨に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕
歯科用電気エンジン、マイクロモーター、高速レーズなどに装着して使用する。

- 〔使用方法に関する使用上の注意〕
- 1) 30,000回転/分以下で使用する事。
最高許容回転速度(回転数)を超えて、絶対に使用しないこと。
 - 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
 - 3) 使用前に予備回転をし、振れがない事を確認すること。
 - 4) 砥石部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは折れたり曲がったりする事があるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- ① 変形、損傷(錆、表面キズ、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- ② 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスクを使用すること。
- ③ 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- ④ 本材は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- ① 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
 - ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社ダイテックジャパン
住所	静岡県沼津市大平 667-7
電話番号	0559-35-1200
F A X	055-935-1201