

歯科材料 9 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN コード：70907000

正宗チャモイスソフト ご使用前に必ずお読みください。

【形状、構造及び原理等】

①形状 (単位：mm)

	径	一枚厚さ
作業部	20.0	10.0
軸部	2.35	-

②構造

作業部：鹿皮

軸部：ステンレス鋼

⑦ 本材は【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ① 直射日光、高温は避けて保管すること。
- ② 水分、腐食性薬剤及び蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨・清掃に用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

販売元 日新デンタル株式会社・内外歯材株式会社

【使用方法等】

〔使用方法〕

歯科用駆動装置又は歯科用技工回転機器に装着し、
MAX9,000 回転以下で使用し、断続的に被研削物に
接触させ研磨・清掃する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ① ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ② 作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ芯振れ、その他の危険を取り除くこと。

製造販売業者 株式会社ダイテックジャパン

住所 静岡県沼津市大平 667-7

電話 055-935-1200

FAX 055-935-1201

【使用上の注意】

- ① 指定回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- ③ 無理な力を加える事は絶対にしないこと。破損の原因となる。
- ④ 片減りなど生じた時は速やかに修正し、常に芯振れの無い状態で使用すること。
- ⑤ 研磨時の火花が研磨屑の粉塵に着火し、燃えることが有るので粉塵がダクト等に溜まらないよう、又火花が粉塵の中に入らない様にするこ
と。
- ⑥ 目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。